

Modelo

Equipamentos de Proteção Contra Quedas

[KIT MACA PARA RESGATE SKED]

Instruções de Uso

Para Desenrolar a Maca Sked® e a esticar no chão



1. Retire a Sked® da embalagem e coloque-a no chão.



2. Solte a tira de fixação, pise na extremidade para os pés da Sked®, e desenrole completamente a extremidade oposta.



3. Dobre a Sked® ao meio e a enrole para trás. Repita o procedimento com a extremidade oposta da maca.



1. A Maca Sked® ficará, então, esticada.

**Para colocar um paciente na Sked®:
Método Manobra de Giro**



1. Coloque a Maca Sked® ao lado do paciente. Assegure-se de que a extremidade para a cabeça da maca esteja ao lado da cabeça do paciente. Coloque as tiras cruzadas sob a Sked®.



2. Efetue a manobra de giro do paciente e passe a Sked®, o mais que puder por baixo do paciente. Com cuidado, gire o paciente para a maca Sked®.



3. Deslize o paciente para o centro da Maca Sked®. Certifique-se de manter a coluna vertebral o mais reto possível.



4. Puxe as tiras que estão debaixo da Maca Sked® para fora e aperte as fivelas. (Veja pág.5)

Para colocar um paciente na Sked®:

Método Deslizante



1. Posicione a extremidade para os pés da Maca Sked® à cabeça do paciente



2. Faça com que um socorrista abra a Sked® e apoie a cabeça, o pescoço e os ombros do paciente.



3. Segure as tiras para os pés da Maca Sked® e as deslize por baixo do paciente.



4. Centralize o paciente no centro da Maca Sked® e fixe as tiras nas fivelas (ver pág 5).


Como posicionar e fixar as tiras nas fivelas



1. Desenrole a Maca Sked® e a estique.



2. Levante as laterais da Sked® e fixe as quatro tiras cruzadas das fivelas diretamente no lado oposto das tiras.

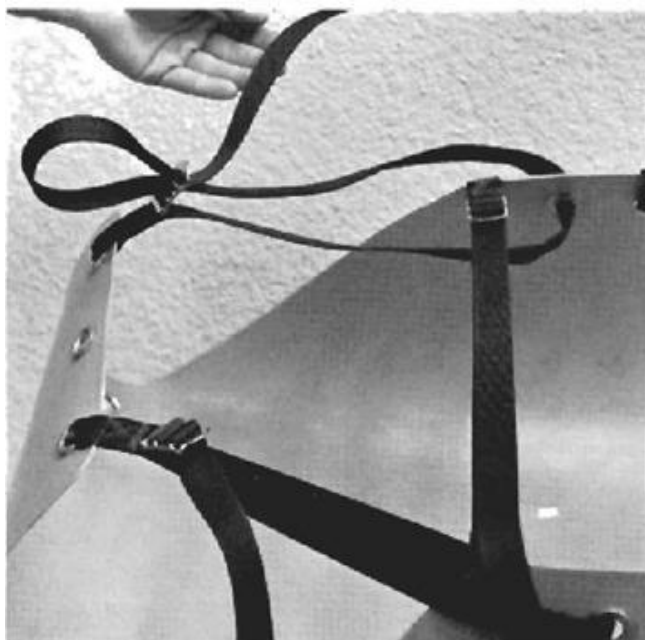

3. Passe as tiras dos pés pelos ilhoses não utilizados na extremidade para os pés da Sked® e aperte as fivelas (conforme mostrado na foto acima).




4. Maca Sked® com todas as tiras afiveladas de maneira adequada.


Elevação/descida Horizontais

Duas cintas de náilon classificadas **em 9.000 libras mbs** cada são usadas para a elevação/descida na

horizontal. A tira para a cabeça é **6"** mais curta do que a tira para o pé e é utilizada apenas na extremidade para a cabeça da maca.

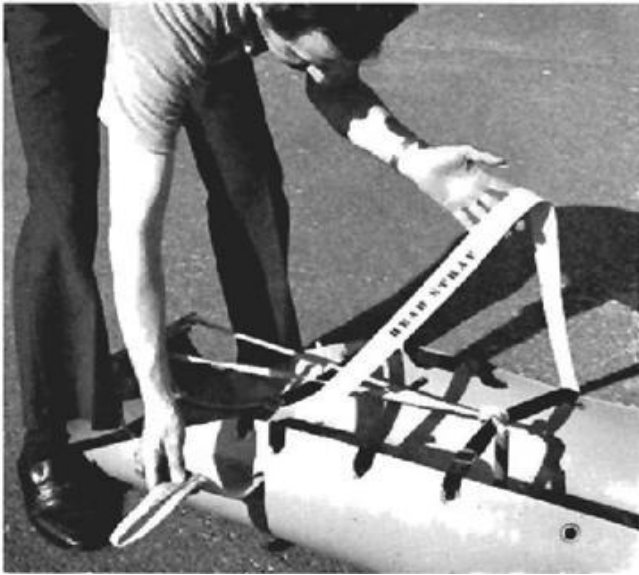

1. Insira uma extremidade da tira para cabeça pelo orifício de elevação na extremidade para a cabeça da maca.

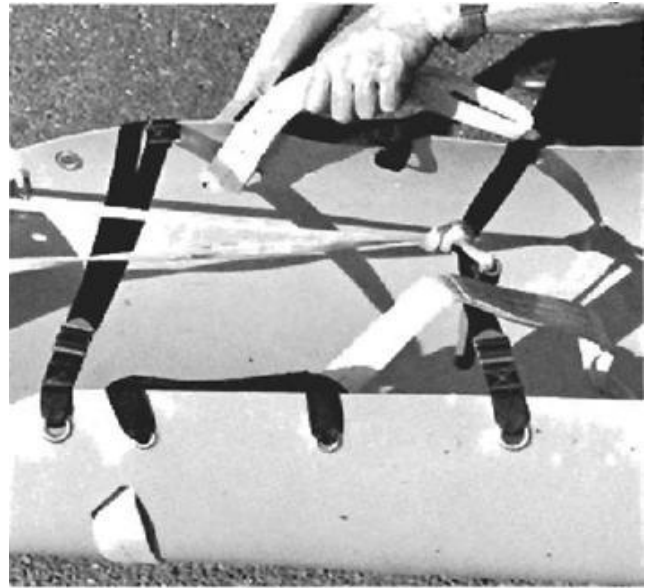

2. Coloque a tira sob a Sked® e através do orifício no lado oposto da Sked®.



3. Equalize a tira. Repita o procedimento com a outra tira na extremidade para os pés da Sked®.



4. Equalize as quatro tiras e as fixe no mosquetão de travas de aço grande.

Descida/elevação Vertical

Uma corda estática da kernmantle de **3/8" de 30 pés** de comprimento com um nó-de-oito amarrado no

centro são utilizados para configurar a Maca Sked® para descida/elevação vertical.



1. Passe cada extremidade da corda pelos ilhoses na extremidade da cabeça da maca. Puxe o nó para cima, contra a maca.



- 1A. Método alternativo para uso em espaços confinados apertados.



2. Continue dando corda através dos ilhoses não utilizadas e alças de transporte totalmente até a extremidade para os pés da Sked®. Certifique-se de que ambas as extremidades da corda fiquem iguais.




3. Passe as extremidades da corda através dos ilhoses na extremidade para os pés da Sked®, de dentro para fora. Amarre as pontas da corda juntas com um nó do tipo direito.

Mochila/Cinturão de Reboque



4. Junte as pontas da cordas por cima da extremidade da Sked®. Passe pelas alças de trasporte e fixe com um nó do tipo direito. Fixe cada lado com um nó simples.

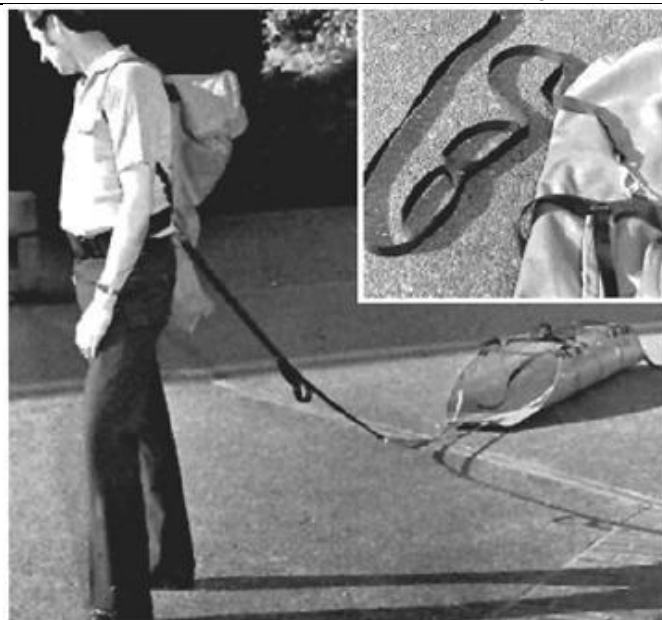

1. Prenda uma extremidade à mochila e a outra no tecido da alça de reboque. A mochila é usada como cinturão de reboque.

Outros acessórios Alças Removíveis de Tecido



1. Um conjunto de 4 alças removíveis de tecido permite que até 8 socorristas carreguem a Sked®. Insira através dos ilhoses não utilizados na lateral da Sked®.



2. O cinto de reboque é fixado nos cabos de transportes, permitindo que 3 ou 4 socorristas arrastem a Sked®.

Enrolando a Maca Sked®



1. Estique a maca e coloque a tira de fixação, a fivela lateral para baixo, sob a extremidade para os pés da Sked®.



2. Começando pela extremidade para a cabeça, enrole a Sked® para cima o mais apertado possível.



3. Continue a enrolar a Sked®, utilizando o joelho para impedir que a maca se desenrole




4. Aperte a tira de fixação pré-colocada na fivela e coloque a Sked® na mochila.

KIT DE FIVELAS DE CONEXÃO/LIBERAÇÃO RÁPIDA OPCIONAL

ADVERTÊNCIA

Apenas para uso em superfícies! Não é própria para içamento

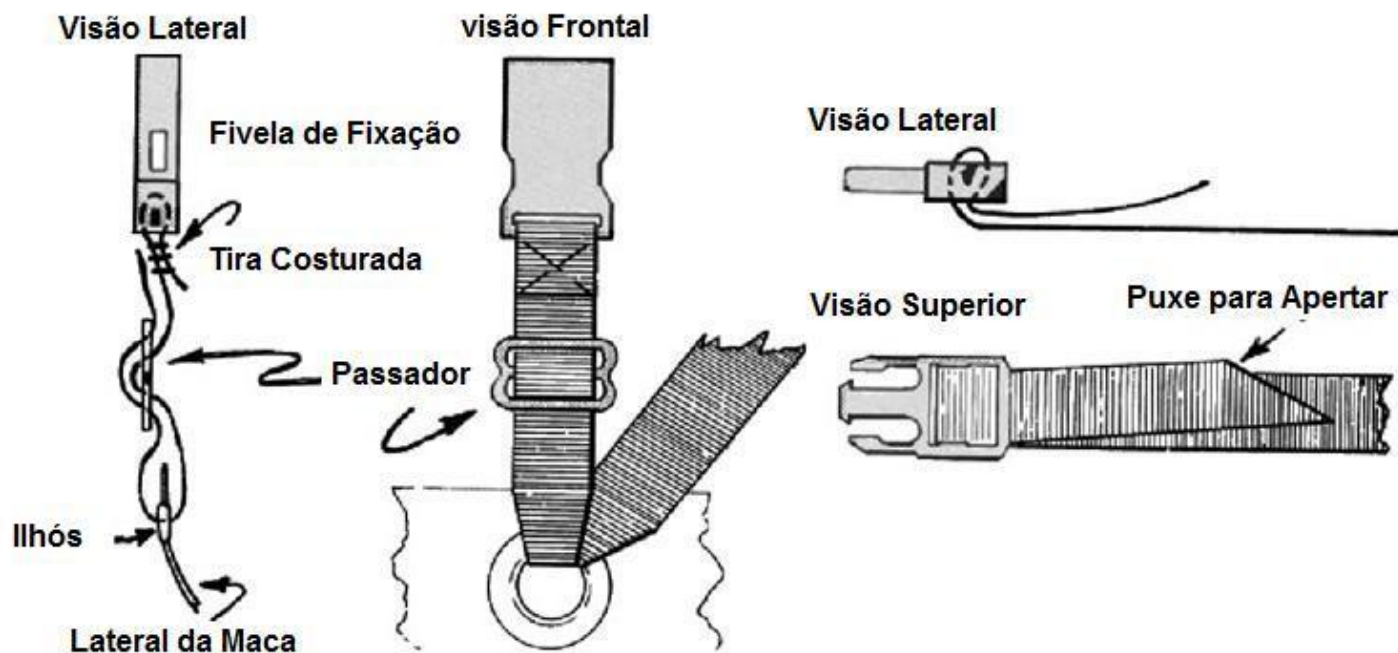**NOTA:**

O PACIENTE DEVE SER COLOCADO NO DISPOSITIVO DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL APROVADO SE FICAR CONSTATADO, OU SE HOUVER, SUSPEITAS, DE QUE HÁ LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL. EFETUE ESTE PROCEDIMENTO ANTES DE COLOCAR O PACIENTE NA MACA SKED®.



Fabricado por

SKEDCO INC.
PO Box 3390
10505 SW Manhasset Dr
Tualatin OR 97062
www.Skedco.com
Tel : 503.691.7909
Fax : 503.691.7973

Distribuído pela
MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda.

Av. Roberto Gordon, 138
Diadema - SP 09990-901 Brasil
CNPJ: 45.655.461/0001-30
Fone: (11) 4070-5999 - Fax: (11) 4070-5990
vendas@msasafety.com
www.MSAsafety.com

218959 - Rev0 – 19/12/2013