



GE Healthcare

Inspiratory Safety Guard



Zur Verwendung mit dem CARESCAPE™ R860 Beatmungssystem

Der Inspiratory Safety Guard (ISG) wird zum Anschließen des Schlauchsystems an das Beatmungssystem benötigt. Mithilfe eines mechanischen hydrophoben Filters verhindert der ISG, dass das Atemgas des Patienten den inspiratorischen Atemgasabschnitt des Beatmungssystems kontaminiert.

Leistungsmerkmale

- Hohe Bakterien- und Virenfiltereffizienzzraten zur Vermeidung von Kontamination des Beatmungssystems
- Mit dem Universalanschluss ist die Verwendung mit jedem Standard-Schlauchsystem möglich
- Das Mehrpatienten-Design hilft, Abfall zu reduzieren, während das Beatmungssystem weiter sicher und effizient funktioniert

Unsere Geräte. Unser Zubehör. Einfach kompatibel.

Vertrauen Sie auf die hochwertigen Zubehör- und Verbrauchsartikel von GE Healthcare für einen effizienten Betrieb Ihrer klinischen Geräte.

- Vereinfachte Bestellprozesse
- Schnelle Lieferung
- Ein Ansprechpartner
- Kompetente Beratung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bakterienfiltereffizienz (BFE)*	>99,999%
Virenfiltereffizienz (VFE)*	>99,999%
Widerstand (bei 30 l/min)	1,7cm H ₂ O
Totraum	47 ml
Gewicht	< 60g

*Gemäß Nelson Laboratories Inc., Salt Lake City, USA

[gehealthcare.com/products/accessories-and-supplies](https://www.gehealthcare.com/products/accessories-and-supplies)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktgebrauch

Der ISG kann nicht gereinigt werden. Er wird verwendet, um zu verhindern, dass das Atemgas des Patienten den inspiratorischen Atemgasabschnitt des Beatmungssystems kontaminiert. Der Inspiratory Safety Guard (ISG) muss zwischen den Patienten nicht gewechselt werden; er muss ausgetauscht werden, wenn das Atemgas des Patienten das Sicherheitsventil passiert hat. Dies kann in folgenden Situationen auftreten:

- Übermäßiger oder anhaltender Druck im System, erkennbar an folgenden Alarmmeldungen: Sicherheitsventil offen, Patientenschlauchsystem blockiert, anhaltender Atemwegsdruck
- Fehler bei der Luft- oder O₂-Zufuhr bei Anschluss am Beatmungssystem

Materialien

Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Filter: Filtermaterial

Materialzusammensetzung

Frei von BPA, DEHP, Natur-Latex, PVC oder anderen Phthalaten.

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
Luftfeuchtigkeit: bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Aufbewahrung

An einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei GE Healthcare. Besuchen Sie auch www.gehealthcare.com.

Haltbarkeit

Ab Herstellungsdatum fünf Jahre haltbar.

Entsorgungshinweise

Entsprechend den Krankenhausrichtlinien, örtlichen Vorgaben und den geltenden Bestimmungen als klinischen Abfall entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Primärverpackung: Polybeutel – Polyethylen (PE)

Normen/Vorschriften

ISG-konform mit (RoHS) Richtlinien.

Konformität

CE-Kennzeichnung

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel-nummer	Beschreibung	Menge
5830446	Inspiratory Safety Guard BCG	1
5514015	Inspiratory Safety Guard BCG	10

