



Science.
Applied to Life.™



Gefäßkatheter nahtlos fixieren

Nahtlos, sicher,
antimikrobiell

**3M™ PICC/CVC Fixierplatte
+ Tegaderm™ CHG Chlorhexidingluconat I.V.
Fixierverband**

Lösungen für die Fixierung von Gefäßkathetern, die nicht nur sicher und zuverlässig, sondern auch einfach anzuwenden und patientenfreundlich sind, spielen besonders in den Zeiten von Ressourcenknappheit eine wichtige Rolle. Das PICC/CVC Fixiersystem mit Tegaderm CHG vereint gleich mehrere Vorteile in einem Produkt. Das System ist so konzipiert, dass es bis zu sieben Tage an Ort und Stelle bleibt, sich aber dennoch sanft entfernen lässt. Es bietet Ihren Patienten die notwendige Sicherheit, Komfort und darüber hinaus einen antimikrobiellen Schutz.

Zuverlässige Fixierung: Fixierplatte und Verband sind optimal geeignet für bis zu 3-lumige Katheter bis 12 Charrière.

Antimikrobieller Schutz: Das integrierte CHG Gelkissen sorgt für einen unmittelbaren und anhaltenden Schutz und führt zu einer Reduktion der vermeidbaren Gefäßkatheter-assoziierten Blutstrominfektionen um mehr als 60 %.⁽¹⁾

Sichtkontrolle: Transparenter Verband und CHG Gelkissen ermöglichen die kontinuierliche Kontrolle der Einstichstelle.



⁽¹⁾ Timsit JF, et al. Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-Related Infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12):1272-1278.

3M™ PICC/CVC Fixierplatte

+ Tegaderm™ CHG Chlorhexidingluconat I.V. Fixierverband

Gefäßkatheter sicher fixieren


- Nahtlose, sichere Fixierung
- Kann bis zu 7 Tage auf der Haut verbleiben
- Sanftes Entfernen, ohne dem Patienten unnötige Schmerzen zuzufügen
- Geeignet für die Mehrzahl der PICC-Line-Katheter und zentraler Venenkatheter bis einschließlich 12 Charrière und bis 3 Lumen

Erleichtert den Klinikalltag

- Schnelle und einfache Applikation und Entfernung
- Halteplatte kann während der initialen Applikation noch ohne Verlust der Klebekraft repositioniert werden
- Schützt vor Nadelstichverletzungen
- Aseptische Non-Touch-Technik (ANTT)

Prävention von Blutstrominfektionen (CRBSI)

- CHG Gelkissen reduziert Mikroorganismen und schützt vor Neubesiedlung im Bereich der Einstichstelle des Katheters
- Die Wirkung von CHG setzt sofort ein und hält bis zu 7 Tage kontinuierlich an

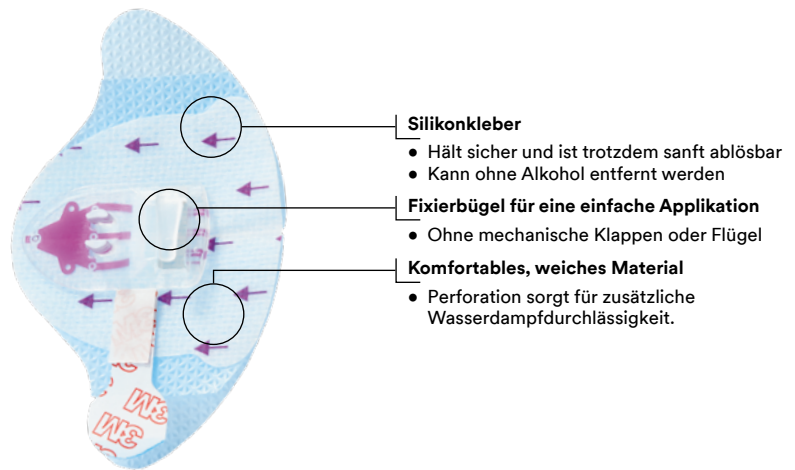

Silikonkleber


- Hält sicher und ist trotzdem sanft ablösbar
- Kann ohne Alkohol entfernt werden

Fixierbügel für eine einfache Applikation

- Ohne mechanische Klappen oder Flügel

Komfortables, weiches Material

- Perforation sorgt für zusätzliche Wasserdampfdurchlässigkeit.

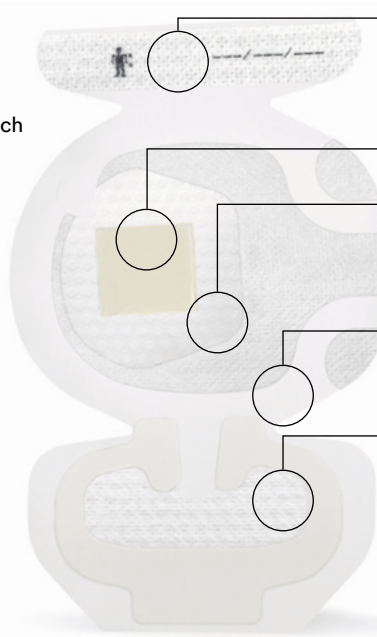

Dokumentationsstreifen

- Bietet zusätzliche Fixiermöglichkeit

Integriertes CHG Gelkissen

- Wirkt auch, wenn kleinere Mengen Blut oder andere Flüssigkeiten vom Gelkissen absorbiert wurden

Tegaderm™ I.V. Advanced Transparenter Filmverband

- Filmverband und Gel bleiben transparent für eine kontinuierliche Kontrolle der Einstichstelle
- Bildet eine wasserdichte, sterile Barriere gegen externe Verunreinigungen*

Verstärkter Applikationsrahmen

- Maximiert Fixierung und Tragedauer
- Verband und Fixierstreifen sind vollflächig laminiert und wasserdicht

Fixierstreifen

- Zusätzliche Stabilisierung

* In-vitro-Untersuchungen zufolge bietet der transparente Film des 3M™ Tegaderm™ CHG Verbands eine virale Barriere gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder mehr, während der Verband intakt bleibt und das Austreten von Absonderungen somit verhindert werden kann.

Bestellinformationen 3M™ PICC/CVC Fixiersystem

Art.-Nr.	Produkt	Größe Fixierplatte	Größe Verband	Fixierplatte + Verband/Pkg.	Packung/ Versandeinh.	PZN	PZN	Pharmacode	MiGel
Sichere Katheterfixierung mit antimikrobiellem Schutz									
1877R – 2100	PICC/CVC Fixierplatte + Tegaderm CHG	5,1 cm x 5,4 cm	8,5 cm x 11,5 cm	20	4	04712128	5756719	7721518	03.07.04.05.1
1879R – 2100	PICC/CVC Fixierplatte + Tegaderm CHG	5,1 cm x 5,4 cm	10 cm x 15,5 cm	20	4	04712134	5756725	7721524	03.07.04.05.1
Sichere und zuverlässige Katheterfixierung									
1837 – 2100	PICC/CVC Fixierplatte + Tegaderm I.V. Advanced	5,1 cm x 5,4 cm	8,5 cm x 11,5 cm	20	4	04712105	5756694	7721493	03.07.04.02.1
1839 – 2100	PICC/CVC Fixierplatte + Tegaderm I.V. Advanced	5,1 cm x 5,4 cm	10 cm x 15,55 cm	20	4	04712111	5756702	7721501	03.07.04.02.1

www.3M.de/Blutstrominfektionen-stoppen



3M Deutschland GmbH Health Care Business

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel +49 (0)2131 881 9260
E-Mail: 3Mmedica.de@mmm.com
www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH Health Care Business

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel +43 (0)186 68 60
E-Mail: medizin-at@mmm.com
www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH Health Care Business

Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90
E-Mail: innovation.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

EB12-0252/2023-0001

© 3M 2023. 3M, 3M Science, Applied to Life und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.