

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

**Systèmes de bandage
compressif à deux couches
Coban^{MC} 2 3M^{MC}**

Les Systèmes de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} sont conçus pour appliquer une compression confortable et thérapeutique pour le traitement des ulcères veineux de la jambe, du lymphœdème et des autres conditions pour lesquelles la compressothérapie est appropriée.

Une compression confortable

Conçus pour l'efficacité

Des études effectuées par des cliniciens du monde entier, comprenant des essais contrôlés randomisés, fournissent des données probantes indiquant que les Systèmes de bandage compressif Coban 2 :

- procurent une compression soutenue sans glissement
- réduisent l'œdème chronique
- favorisent la cicatrisation et réduisent la taille des ulcères veineux de la jambe
- réduisent considérablement la douleur aux jambes¹
- sont sûrs et bien tolérés²
- sont faciles à appliquer et à enlever
- sont préférés par les patients³

* Caractéristique applicable uniquement au Système de bandage compressif Coban 2.

Conçus pour une application uniforme

La compression est thérapeutique lorsqu'une pression suffisante est appliquée. Une pression trop faible minimisera les avantages et une pression trop élevée peut causer des dommages ou ne pas être tolérée par le patient. Nous avons conçu notre couche de compression pour qu'elle soit appliquée à pleine extension, éliminant les incertitudes.

Lors d'une évaluation comparative multicentrique internationale, 32 experts en application de bandage ont appliqué leur système de bandage compressif le plus familier à un membre artificiel avec des capteurs de pression : **ceux qui ont appliqué les bandages étaient en mesure d'appliquer une compression considérablement plus uniforme avec le Système de bandage compressif Coban 2** grâce à l'application à pleine extension. Ceux qui ont appliqué les bandages ont également trouvé le Système de bandage compressif Coban 2 plus facile et plus rapide à appliquer⁴.





Simple et efficace

Conçus pour le confort, la mobilité et la vie de tous les jours

Les Systèmes de bandage compressif Coban 2 procurent une compression thérapeutique soutenue jusqu'à sept jours¹. Les matériaux minces et légers créent un manchon perméable à l'air qui permet aux patients de porter leurs propres chaussures et vêtements. Comme les bandages sont confortables à porter, les patients sont plus susceptibles de les garder, ce qui augmente ainsi l'observance et le potentiel d'un traitement efficace^{5,6}.

Le système à deux couches génère des pressions d'utilisation soutenues et des pressions confortables au repos, rendant ainsi la compression facile à tolérer, peu importe le niveau d'activité.

Le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC} est approprié pour les patients moins tolérants à la compressothérapie, les patients avec une étiologie mixte et ceux présentant un indice de pression systolique cheville/bras de $\geq 0,5$, qui sont fragiles ou qui sont moins mobiles.

« Les Systèmes de bandage compressif Coban 2 se sont avérés inestimables quant à la réduction de l'œdème et ont permis une qualité de vie améliorée. La simplicité de l'application uniforme des Systèmes compressifs Coban 2 a permis une polyvalence dans des milieux hospitaliers et communautaires, y compris les sites ruraux. »

— Rosemary Hill

Conçus pour rester en place

Nos matériaux enchevêtrés brevetés s'unissent les uns aux autres, créant un manchon inélastique qui adhère en douceur à la peau et réduit le risque de glissement ou d'entassement inconfortable^{3,5}.

Lors d'un essai contrôlé randomisé, les patients ont rapporté considérablement moins de glissement avec le Système de bandage compressif Coban 2 en comparaison avec celui de Profore^{MC1}.

En savoir plus sur les Systèmes de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}.

3M.ca/Coban2Layer-fr



IPCB (indice de pression systolique cheville/bras)

Utilisez ce tableau comme guide pour interpréter les valeurs de l'IPCB par rapport à la compression.

- **IPCB < 0,5 : ischémies très sévère et sévère**
Ne pas utiliser de compression
- **IPCB 0,5 à 0,8 : ischémies modérée et légère**
Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}
- **IPCB ≥ 0,8 : normal**
Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC} et
Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}

Énoncé de position sur l'utilisation d'un indice de pression systolique cheville/bras dans l'évaluation des patients ayant une maladie vasculaire périphérique. Un énoncé de consensus élaboré par la Division des normes de la Société de la radiologie interventionnelle.

Des indices de pression systolique cheville/bras aussi élevés que 1,10 sont normaux; les valeurs anormales sont celles inférieures à 1,0. La majorité des patients souffrant de claudication ont des IPCB allant de 0,3 à 0,9. Une douleur au repos ou une maladie occlusive sévère survient généralement avec un IPCB inférieur à 0,50. Des indices inférieurs à 0,20 sont associés à des extrémités ischémiques ou gangreneuses.

SACKS, D., M.D., et coll. *J. Vasc. Interv. Radiol.*, vol. 14, n° S389 (2003).

Soutien pour les produits et formation sur la gestion de l'œdème

Pour en savoir plus sur les Systèmes compressifs Coban 2, veuillez consulter le site Web.3M.ca/Coban2Layer-fr, communiquer avec le représentant de compte de 3M de votre région ou appelez le Centre d'assistance téléphonique de Soins de santé 3M en composant le 1 800 364-3577.

		Pression systolique au bras (mm de Hg)											
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
Pression systolique à la cheville (mm de Hg)	20	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	Ischémie très sévère
	30	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	
	40	0,40	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	
	50	0,50	0,45	0,42	0,38	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	Ischémie sévère
	60	0,60	0,55	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33	0,32	0,30	
	70	0,70	0,64	0,58	0,54	0,50	0,47	0,45	0,41	0,39	0,37	0,35	
	80	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	Ischémie modérée
	90	0,90	0,82	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	
	100	1,00	0,91	0,83	0,77	0,71	0,67	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	
	110	1,10	1,00	0,92	0,85	0,79	0,73	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	Ischémie légère
120	1,20	1,09	1,00	0,92	0,86	0,80	0,75	0,71	0,67	0,63	0,60		
130	1,30	1,18	1,08	1,00	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65		
140	1,40	1,27	1,17	1,08	1,00	0,93	0,88	0,82	0,78	0,74	0,70	Normal	
150	1,50	1,36	1,25	1,15	1,07	1,00	0,94	0,88	0,83	0,79	0,75		
160	1,60	1,45	1,33	1,23	1,14	1,07	1,00	0,94	0,89	0,84	0,80		
170	1,70	1,55	1,42	1,31	1,21	1,13	1,06	1,00	0,94	0,89	0,85		
180	1,80	1,64	1,50	1,38	1,29	1,20	1,13	1,06	1,00	0,95	0,90		
190	1,90	1,73	1,58	1,46	1,36	1,27	1,19	1,12	1,06	1,00	0,95		
200	2,00	1,82	1,67	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,11	1,05	1,00		

Renseignements pour commander Systèmes de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}

Application/ utilisation	Nom	Numéro de référence	Format	Bas en nylon noir	Rouleaux/boîte Boîtes/caisse
Sous le genou	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 3M ^{MC}	2094N	Couche de confort : 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg) non étirée	1	1/boîte 8/caisse
			Couche de compression : 10 cm x 4,7 m (4 po x 5,1 vg) étirée		
Sous le genou (IPCB ≥ 0,5)	Système de compression à deux couches Coban ^{MC} 2 Lite 3M ^{MC}	2794N	Couche de confort : 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg) non étirée	1	1/boîte 8/caisse
			Couche de compression : 10 cm x 4,7 m (4 po x 5,1 vg) étirée		
Sous le genou (grande circonférence)	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 3M ^{MC}	2094XL	Couche de confort : 10 cm x 3,5 m (4 po x 3,8 vg) non étirée	1	1/boîte 8/caisse
			Couche de compression : 10 cm x 5,8 m (4 po x 6,3 vg) étirée		
Au-dessus du genou	Système de bandage compressif à deux couches Coban ^{MC} 2 3M ^{MC}	20096	Couche de confort : 15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 vg) non étirée	—	1/boîte 8/caisse
			Couche de compression : 15 cm x 4,5 m (6 po x 4,9 vg) étirée		

Les Systèmes de bandage compressif à deux couches Coban 2 3M sont exempts de latex de caoutchouc naturel.

1 MOSTI, G., A. CRESPI et V. MATTALIANO. « Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multi-centre, Randomized, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures », *Wounds*, vol. 23, n° 5 (2011), p. 126-134.

2 HAMPTON, S., A. KERR et M. CROSSLEY. « Summary of five case studies on the treatment of venous leg ulcers with a new two layer compression system in a community setting », données internes de 3M, 2006.

3 MOFFAT, C., L. EDWARDS, M. COLLIER, T. TREADWELL, M. MILLER, L. SHAFER, R.G. SIBBALD, A. BRASSARD, A. MCINTOSH, A. REYZELMAN, P. PRICE, S.M. KRAUS, S.A. WALTERS et K. HARDING. « A randomised controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ 2 Layer Compression System versus Profore™ to evaluate the product performance in patients with venous leg ulcers », *Int. Wound J.*, vol. 5, n° 2 (2008), p. 267-279.

4 COLLIER, M. et J. SCHUREN. « Facilité d'utilisation et reproductibilité de cinq systèmes de bandage compressif », *J. Wound Care*, suppl. de 3M (2007), p. 8-10.

5 SCHUREN, J. et C. ANDREAS. « Pression et dérapage pendant 48 heures de traitement compressif : une étude sur les volontaires en bonne santé », affiche présentée au SAWC, en 2010.

6 SCHNOBRICH, E., S. SOLFEST, S. BERNATCHEZ, C. ZEHRER, J. TUCKER et S.A. WALTERS. « 7-Day, In-use Assessment of a Unique, Innovative Compression System », données internes de 3M, affiche présentée au SAWC, en 2006.



Produits offerts au Canada par :

La Compagnie 3M Canada
Division des solutions médicales
300, rue Tartan
London (Ontario) N5V 4M9
Canada
1 800 364-3577
3M.ca/Médicales

La Compagnie 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
É.-U.
1 800 228-3957

© 2023, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées, utilisées sous licence au Canada. Toute utilisation non autorisée est interdite. Profore est une marque de commerce de Smith & Nephew.
2302-25664 F CA_FR_70-2013-1526-7