

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä







## Tuotekuvaus

**3M™ ESPE™ Sof-Lex™ kiillotusjärjestelmä** on kaksivaiheinen, monikäyttöinen kiillotusjärjestelmä. Laikat sopivat samaan kehränvarteen mihin 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ viimeistely- ja kiillotuskiekot. Laikat on valmistettu Termoplastisesta elastomeerista johon on impregnoitu synteettisiä timantteja ja alumiinioksidihiuksia.

Laikan muoto mahdollistaa käytön kaikilla hammaspinnoilla jolloin et tarvitse useita eri muotoisia kiillotusvälineitä (esim. kärkiä, kuppeja, kiekkoja ja harjoja), jotka on suunniteltu tietyn tyyppisten pintojen kiillotuksen.

### Yksi muoto

- Sopii kaikille hammaspinnoille
- Toimii kaikista suunnista
- Sopii etu- ja taka-alueelle
- Luonnollinen kiilto vain kahdella työvaiheella

## Indikaatiot

3M™ ESPE™ Sof-Lex™ esikiillotuslaikka (beige) on indikoitu valmistelemaan kiillotettava pinta loppukiillotusta varten. 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka (pinkki) on indikoitu loppukiillotukseen. Laikoilla voidaan kiillottaa:

### Suorat:


- Yhdistelmämuovitäytteet
- Muovivahvisteiset lasi-ionomeerit
- Bis-akryyliset väliaikaiset työt

### Epäsuorat:

- Yhdistelmämuovit
- CAD/CAM -hybridimateriaalit
- Jalot ja epäjalot metallit


Molempia laikkoja käytetään alhaisilla nopeuksilla 15,000–20,000 r/min. Kiillotettava pinta kannattaa pitää kosteana. Lasimainen kiilto saavutetaan näin nopeammin kuin ilman vettä kiillotettaessa.

# Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä

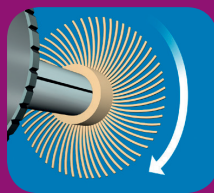


15.000 - 20.000  
kierrosta/min.

Sof-Lex™ esikiillotuslaikka

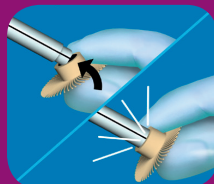


a.

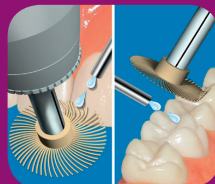


b.

Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka

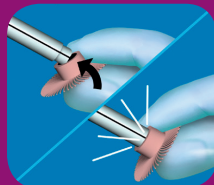

a.

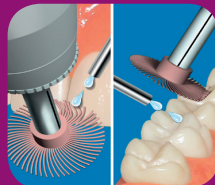

b.



Okklusaali



Bukkaali



Linguaali taka-alue



Linguaali etualue



Labiaali




Approksimaali

# Yleinen toimenpide

## Sopivat tuotteet viimeistelyyn ja kiillotukseen alusta loppuun.

Sof-Lex kiillotusjärjestelmä on värikoodattu tummasta (karkea) vaaleaan (erittäin hieno), jonka ansiosta työskentely on helppoa. Pop-On kiinnitys helpottaa vaihtoja kiekkojen ja laikkojen välillä, jotta voit tehokkaasti edetä läpi viimeistely- ja kiillotustyövaiheen.

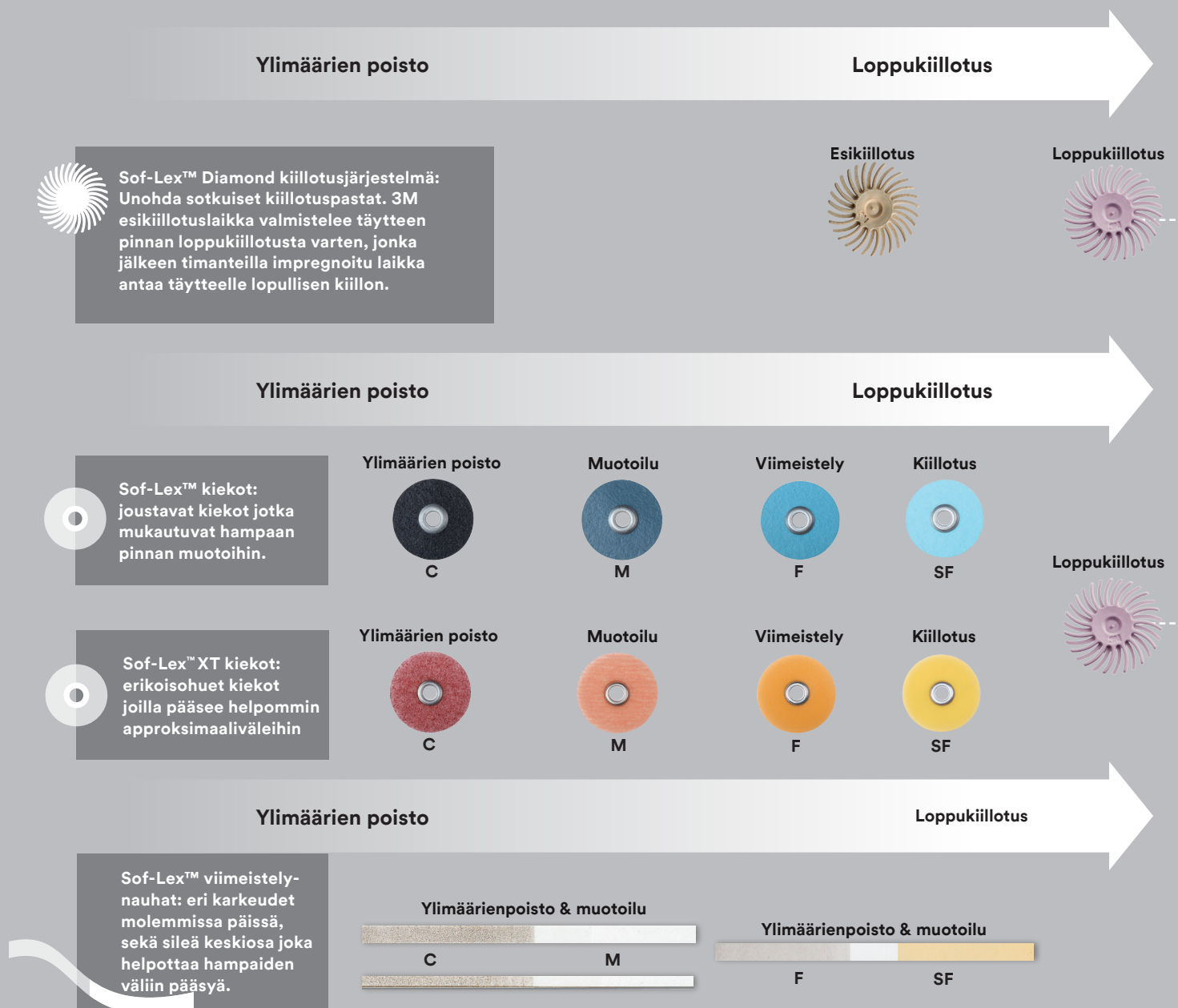




| Tilausnro. | Sisältö                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5092I      | <b>Sof-Lex™ Diamond kiillotusjärjestelmä—peruspakkaus</b><br>5 Sof-Lex™ esikiillotuslaikkaa (beige); 5 Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikkaa (pinkki); käyttöohjeet; kuvallinen tekniikkaohjekortti |
| 5090       | <b>Sof-Lex™ esikiillotuslaikka—refilli</b><br>15 Sof-Lex esikiillotuslaikkaa (beige)                                                                                                            |
| 5091       | <b>Sof-Lex™ Diamond kiillotuslaikka—refilli</b><br>15 Sof-Lex Diamond kiillotuslaikkaa (pinkki)                                                                                                 |

## Sof-Lex™ muotoilu ja kiillotuskiekot

Sof-Lex™ muotoilu ja kiillotuskiekot refillit sis. 85 kiekkoa

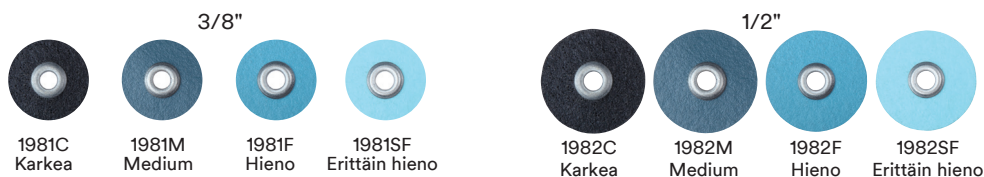

2380 Sof-Lex™ XT (erikoisohuet) viimeistely- ja kiillotuskiekot - aloituspakkaus  
30 kiekkoa kutakin karkeutta; karkea, medium, hieno ja erittäin hieno, sekä ø 9.5 mm että ø 12.7 mm; 1 RA kehränvarsi

## Sof-Lex™ XT (erikoisohuet) viimeistely- ja kiillotuskiekot

Refillit sis. 85 kiekkoa



## Sof-Lex™ viimeistelynauhat - refillit

|             |              |                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1954 - 4 m  | Läpikuultava | Karkea/Medium 150 nauhaa        |
| 1954N - 4mm | Läpikuultava | Karkea/Medium—kapea 100 nauhaa  |
| 1956 - 4 mm | Keltainen    | Hieno/Erittäin hieno 120 nauhaa |

## Mandrel Refillit

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 1983RA 3 RA kehränvartta (kulmakappaleeseen)        |
| 1983HP 3 HP kehränvartta (suoraan käsikappaleeseen) |
| 1983FG 3 FG kehränvartta (turbiiniinnityksellä)     |



3M Oral Care  
Keilaranta 6  
02150 Espoo  
Puh. (09) 52 521  
www.3MESPE.fi

3M, ESPE, Filtek ja Sof-Lex ovat 3M:n tai 3M Deutschland GmbH:n tuotemerkkejä.  
© 3M 2016. © 3M 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. PB610021-1160311