



**Soulagement rapide de la sensibilité.
Libération lente de fluorure.**

3M™ Clinpro™ XT Varnish
Vernis durable à
libération d'ions fluorures



Protection longue durée

3M™ Clinpro™ XT Varnish referme et protège les tubules dentinaires

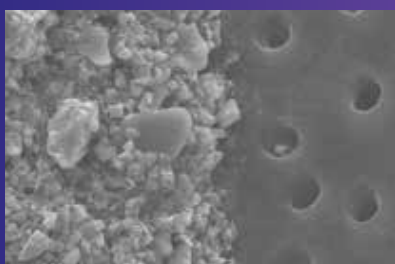


Image MEB de tubules dentinaires exposés (à droite) et 3M Clinpro XT Varnish (à gauche) à un grossissement 3000x qui illustre l'effet barrière.

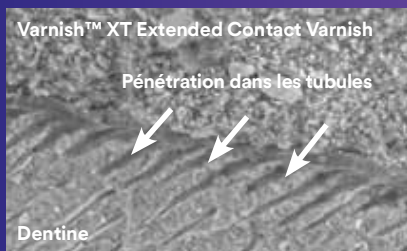


Image de coupe transversale de 3M Clinpro XT Varnish appliqué sur la dentine à un grossissement de 1000x qui illustre les brides résineuses pénétrant dans les tubules.



3M Clinpro XT Varnish est pratiquement invisible lorsqu'il est appliqué sur la surface de la dent.

La barrière protectrice qui soulage immédiatement la sensibilité, libère du fluorure durant 6 mois.

3M Clinpro XT Varnish est un vernis durable à application locale, photopolymérisé qui fournit une couche de protection immédiate pour soulager l'hypersensibilité dentinaire.

- Très efficace pour protéger les surfaces radicaires exposées et sensibles, surtout les surfaces récemment nettoyées à la suite d'un détartrage et d'un surfaçage radiculaire
- Reste sur la dent pendant 6 mois ou plus
- Tolérant à l'humidité : pas besoin de sécher ou de prétraiter la surface de la racine
- Ne requiert pas l'utilisation d'une digue dentaire
- Libère du fluorure, du calcium et du phosphate

XT Varnish réduit la perméabilité de la dentine de 88 %¹

L'occlusion des tubules dentinaires en cabinet procure un soulagement immédiat de la douleur associée au mouvement du liquide à travers les tubules ouverts. Selon des études, XT Varnish, en plus de créer une couche protectrice sur la dentine exposée, pénètre dans les tubules et les referme. Les tests en laboratoire démontrent que XT Varnish réduit la perméabilité de la dentine de 88 %.


XT Varnish protège la surface de la dent des attaques acides

Des tests in vitro menés avec XT Varnish démontrent que le vernis :

- Crée une barrière contre la déminéralisation et l'érosion dues aux acides²
- Offre une protection en plus de recouvrir²
- Aide à réparer l'émail déminéralisé adjacent au vernis³

Ions de fluorure

Test à l'acide

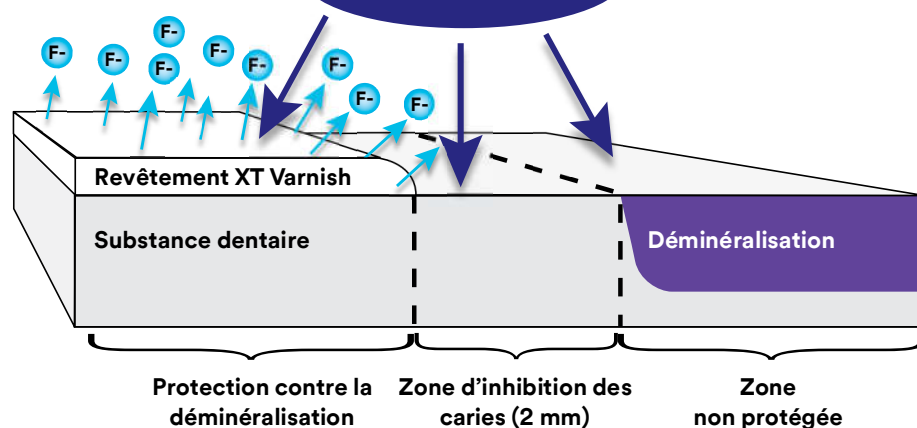


Soulagement immédiat

3M™ Clinpro™ XT Varnish contient du fluorure

3M Clinpro XT Varnish est un verre ionomère modifié à la résine qui libère du fluorure, du calcium et du phosphate. Cela le rend unique par rapport à d'autres désensibilisants utilisés en cabinet. Dans les 24 premières heures,

XT Varnish libère plus de fluorure qu'un vernis au fluorure conventionnel. Vos patients reçoivent non seulement la protection d'une barrière physique, ils bénéficient en plus d'une libération de fluorure à long terme.


**Libération cumulative de fluorure
[Moyenne ± SD] (court terme)**

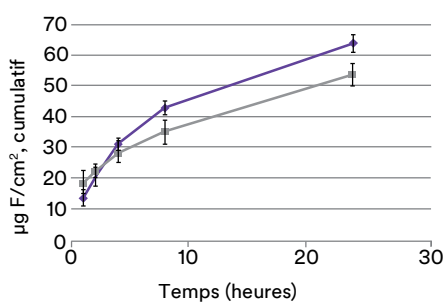

— 3M Clinpro XT Varnish
— Vernis à libération d'ions fluorures conventionnel

Des tests in vitro indiquent que le 3M Clinpro XT Varnish libère plus de fluorure sur 24 heures qu'un vernis au fluorure conventionnel.


**Libération cumulative de fluorure
[Moyenne ± SD] (long terme)**

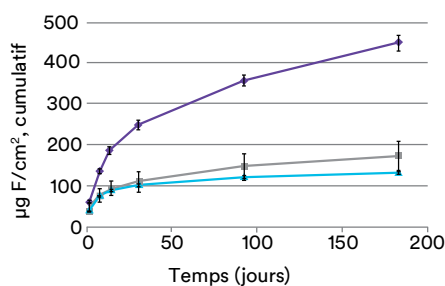

— 3M Clinpro XT Varnish
— Matériau de scellement en verre ionomère
— Résine de scellement contenant du fluorure

Des tests in vitro indiquent que le 3M Clinpro XT Varnish libère plus de fluorure sur 6 mois que les autres vernis.

Recharge au fluorure et libération

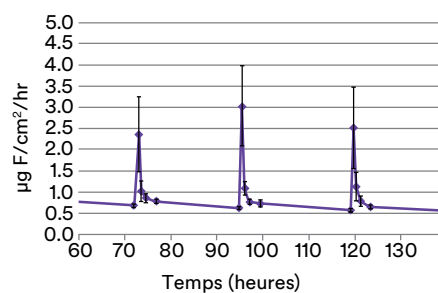

— 3M Clinpro XT Varnish

Des tests in vitro indiquent que le 3M Clinpro XT Varnish est rechargé lors du brossage des dents avec un dentifrice au fluorure.

Source : données internes à 3M

La solution complète – Découvrez les différences

Les produits de soulagement de l'hypersensibilité dentinaire existants offrent de multiples avantages, mais aucun autre produit n'offre tous les avantages de Clinpro XT Varnish.

	Soulagement immédiat de la sensibilité	Revêtement de longue durée	Tolérant à l'humidité	Libération de fluorure	Libération de calcium
3M Clinpro XT Varnish	✓	✓	✓	✓	✓
Désensibilisants à base de glutaraldéhyde (p. ex. Gluma™, Calm-ite)	✓	✓			
Désensibilisants à base de résine (p. ex. Seal & Protect™)	✓	✓			
Vernis traditionnels au fluorure (p. ex. Duraphat®)	✓		✓	✓	

- Rusin et al. (2008). Dentin Permeability of a New Protective Coating Material. *J. Dent. Res.* 87 (Spec Iss A): #1041.
- Rusin et al. (2008). Dentin Permeability of a New Protective Coating Material. *J. Dent. Res.* 87 (Spec Iss B): #627.
- Données internes à 3M.



3M™ Clinpro™ XT Varnish est simple d'utilisation et ne nécessite pas l'utilisation d'une digue dentaire.

Application de 3M™ Clinpro™ XT Varnish sur une surface de la racine exposée à la sensibilité



1. Nettoyez la surface de la dent



2. Rincez à l'eau



3. Retirez l'excédent d'eau accumulée



4. Répartissez sur la surface de mélange



5. Mélangez pendant 15 secondes (2-5 minutes de temps de repos)



6. Appliquez une fine couche sur la surface dentaire



7. Photopolymérisez pendant 20 secondes



8. Essuyez la couche à l'aide d'un applicateur en coton humidifié

Informations de commande



Article	Description du produit
12148	3M™ Clinpro™ XT Varnish Distributeur de 80 doses - 10 g Clicker™

Meer informatie over het gebruik van XT Varnish voor de bescherming van glazuur en voor patiënten met orthodontische beugels vindt u op

www.3M.com/PreventiveCare



3M Belgium bvba/sprl
Oral Care Solutions Division
infodental.be@mmm.com
3M.be/fr/OralCare

REMARQUE : Les dentistes et les médecins prescripteurs doivent tenir compte de l'exposition totale au fluor (soins dentaires, aliments, eau et autres sources) lors de la prescription de ces produits chez les enfants.

3M, 3M Science. Applied to Life. 3M, Aplicap, Clinpro, ESPE, Ketac, Photac et Rotomix sont des marques commerciales de 3M ou de 3M Deutschland GmbH.

Utilisé sous licence au Canada. Imprimé aux États-Unis. © 3M 2019. Tous droits réservés.