



Curos™

Protector de Puerto
Desinfectante

Instrucciones de uso

Curos™


Tapón Desinfectante para Conectores Libres de Aguja

Desinfecta en 1 minuto. Protege los puertos hasta por 7 días.



Desprenda

el respaldo de aluminio de Curos™ Tapón Desinfectante.

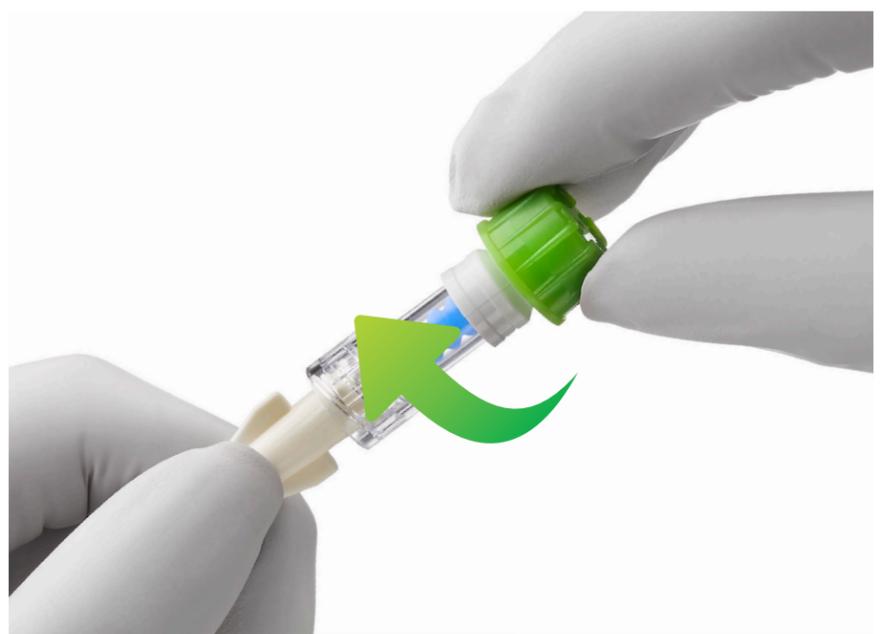

Empuje y gire

Curos Tapón Desinfectante en dirección a las manecillas del reloj hasta llegar al fondo del conector libre de aguja.

- ▶ Si el conector libre de aguja se encuentra visiblemente sucio, realice la desinfección activa con alcohol isopropílico (IPA) al 70% antes de usar el Tapón.
- ▶ No use el Tapón si el sello está roto, rasgado o perforado, o si la esponja está seca.
- ▶ El Tapón debe permanecer en el conector libre de aguja por lo menos un (1) minuto, y puede mantenerse allí hasta por siete (7) días, siempre que no sea removido.
- ▶ El conector libre de aguja se puede acceder inmediatamente después de retirar Curos Tapón Desinfectante que ha estado en su lugar por un mínimo de un (1) minuto.
- ▶ Coloque siempre un Curos Tapón Desinfectante en el conector libre de aguja después de cada uso.
- ▶ Deseche el Curos Tapón Desinfectante después de cada uso.
- ▶ En caso de que realice accesos secuenciales o intermitentes, siga el protocolo del hospital para desinfectar los conectores libres de aguja.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, use las tapas solamente en conectores libres de aguja.

PRECAUCIÓN: Riesgo de asfixia.



Verde significa limpio.



División de Soluciones para
el Cuidado Crítico y Crónico
3M Salud
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 EUA
1-800-228-3957
www.3M.com/C3SD

Por favor, recicle.
© 3M 2017. Todos los derechos reservados.
3M y Curos son marcas registradas de 3M.
70-2011-5738-8

STERILE	R
---------	---

Ingrediente activo: Alcohol isopropílico (IPA) al 70 %. Desechable. Disponible bajo indicación Médica. Este dispositivo no está hecho con goma de látex natural ni dietil hexil ftalato (DEHF) plastificante. Consulte las instrucciones de uso, advertencias y detalles del producto en las etiquetas del dispositivo.