

3M

Cavilon™

Skin Care Solutions

Anwendung von 3M™ Cavilon™ Advanced

zur Prävention und Behandlung der
Inkontinenz-Assoziierten Dermatitis (IAD)



Anwendung von 3M™ Cavilon™ Advanced

zur Prävention und Behandlung der
Inkontinenz-Assoziierten Dermatitis (IAD)

Benötigtes Material:

- ▶ 3M™ Cavilon™ Wasch- & Reinigungstücher oder klares Wasser
- ▶ Weiche, fusselfreie Tücher
- ▶ 3M Cavilon Advanced
- ▶ Untersuchungshandschuhe

Materialvorbereitung



Das Material auf einer sauberen Fläche bereitlegen.



Die Packung von Cavilon Advanced öffnen und den Applikator in der Verpackung belassen.

Positionierung und Reinigung des Patienten



Den Patienten zur Hautreinigung auf die Seite lagern und das Gesäß aufdecken. Den Körper so gut wie möglich zudecken, um Wärmeverlust zu vermeiden und die Intimsphäre zu wahren.



Die Haut gründlich und vorsichtig mit einem pH-hautneutralen Reinigungsmittel oder klarem Wasser reinigen. Intakte Hautbereiche bei Bedarf vorsichtig abtrocknen. Bei Hautläsionen kann überschüssiges seröses oder serös-blutiges Exsudat mit einer Kompresse abgetupft werden.

Handschuhwechsel



Die Handschuhe wechseln.

Ein Applikator reicht etwa für eine Fläche der Größe eines DIN-A4-Blattes.

Für große Flächen kann mehr als ein Applikator verwendet werden.

Nähere Informationen zu Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweisen finden Sie in der Packungsbeilage von Cavilon Advanced.*

*Cavilon Advanced nicht zusammen mit Produkten verwenden, die eine Schutzbarriere enthalten (z. B. Acrylat).

Anwendung von 3M™ Cavilon™ Advanced



Den Applikator nehmen und den Daumen am Ende des Hebels platzieren. Den Schaumstoffapplikator nach unten richten und den Hebel fest drücken, um die innere Ampulle zu brechen.

Beim Brechen der Ampulle ist ein knackendes Geräusch zu hören. Danach muss der Hebel nicht weiter gedrückt werden.



Den Applikator etwa 10 Sekunden lang nach unten halten, damit der Schwamm sich mit Flüssigkeit füllen kann. Ein weiteres Druckausüben auf den Hebel ist nicht nötig, da die Flüssigkeit durch die Schwerkraft selbstständig fließt.

Der Schwamm wird nicht komplett bis in alle Ecken mit Flüssigkeit durchtränkt.



Cavilon Advanced durch vorsichtiges Wischen mit dem Schwamm über den betroffenen Bereich und die umliegende Haut auftragen. Hierbei das Produkt gleichmäßig und mit einer dünnen Schicht auftragen. Der Applikator kann in jede beliebige Richtung bewegt werden.



Das Produkt auf den gesamten zu behandelnden Bereich auftragen. Es muss auf alle Hautstellen aufgetragen werden, die Stuhl und/oder Urin ausgesetzt sind.



Den Bereich mindestens 30 Sekunden lang trocknen lassen.

Wenn Stellen vergessen wurden, vor dem Auftragen von weiterem Produkt die Flüssigkeit vollständig trocknen lassen.



Wenn Cavilon Advanced in einer Hautfalte oder einem anderen Bereich mit gegenseitigem Hautkontakt aufgetragen wird, darauf achten, dass die Hautflächen getrennt werden, bis die Flüssigkeit vollständig getrocknet ist (mindestens 30 Sekunden).

Zusätzliche Information



Das Produkt zweimal wöchentlich auftragen. Cavilon Advanced ist wasserdicht und wird durch die normale Reinigung nicht entfernt. Bei häufigerem Auftragen kann sich das Produkt aufschichten.



Das Produkt vor dem Anlegen eines klebenden Verbandes oder Pflasters über Cavilon Advanced mindestens 60 Sekunden lang trocknen lassen.

Der Film nutzt sich ab und muss nicht entfernt werden. Wenn Sie Cavilon Advanced dennoch entfernen möchten, ist es ratsam einen Klebstoffentferner zu verwenden, der Hexamethyldisiloxan (HMDS) oder ein Silikonpolymer enthält.

Entdecken Sie, wie 3M™ Cavilon™ Advanced die IAD stoppen, heilen und vermeiden kann.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 3MDeutschland.de/endIAD oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter von 3M.

Bestellinformationen

3M Cavilon Advanced

Artikel-Nr.	Größe	Stk./Box	 PZN	 PZN	 Pharmacode
5050G	2.7 ml Applikator	20 Stück	12407238	4736169	7125609



3M

3M Medica
Zweigniederlassung der
3M Deutschland GmbH
Hammfelddamm 11
41453 Neuss
Telefon +49 (0) 21 31 14-0
Telefax +49 (0) 21 31 14 44 32
3MMedica.de@mmm.com
3MDeutschland.de/EndIAD

3M Österreich GmbH
Health Care
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Telefon +43 (0)86 686-0
Telefax +43 (0)86 686-330
Medizin-at@mmm.com
3MAustria.at/EndIAD

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon +41 (0)44 724 92 31
Telefax +41 (0)44 724 92 38
Medical.ch@mmm.com
3MSchweiz.ch/EndIAD

EB12-0007 / 2017-0044

3M und Cavilon sind Marken der 3M Company.
© 3M 2017. Alle Rechte vorbehalten.