



# Attest™


Soluciones de esterilización

Garantía de esterilización de 3M


## Integradores Químicos para Esterilización con Vapor, Tipo 5

### 3M™ Attest™ fáciles de leer

Sin procesar

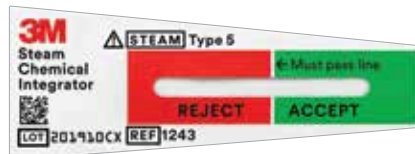


Procesado

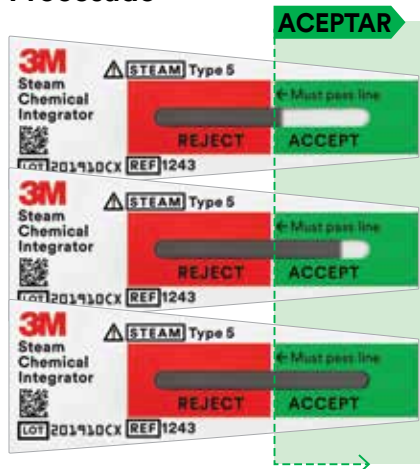

La barra de color ha alcanzado la ventana **ACEPTAR** en las tres muestras que se muestran aquí, lo que indica que se han cumplido las condiciones necesarias para la esterilización. **Si la barra de color se desplaza hacia la región ACEPTAR, se considera aprobado.**

Procesado

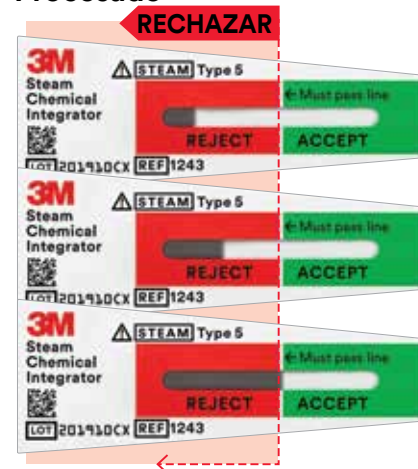

La barra de color está en la ventana **RECHAZAR**, lo que indica que no se han cumplido las condiciones necesarias para la esterilización. El paquete deberá ser reprocesado y deberá investigarse la causa del fracaso de la esterilización. **Si la barra de color está en la región RECHAZAR o sobre la línea, se considera desaprobado.**

Los Integradores Químicos para Vapor, Tipo 5 3M™ Attest™ cumplen con la norma ISO 11140-1:2014.

© 2020 3M. Todos los derechos reservados. 3M y Attest son marcas y/o marcas registradas de 3M. Queda prohibido su uso no autorizado. Se utilizan bajo licencia en Canadá.

70-2009-8636-5