



1. Presione

Presione el IB en el activador para cerrar la tapa y romper la ampolla con el medio de cultivo.



2. Agite

Retire el IB y agite ligeramente su muñeca para asegurar que el medio de cultivo fluya hacia la tira de esporas.



3. Inspeccione

Verifique que el medio de cultivo se ha trasladado a la tira de esporas del IB en el fondo.



4. Incube

Coloque el IB activado en la celda. La pantalla LCD muestra los minutos restantes de incubación o los resultados de la prueba.

NO REMUEVA EL IB hasta que el símbolo de (+) o (-) indique que ha terminado la prueba.

Notas:

- Se recomienda el uso de guantes para la activación de 3M™ Attest™ Indicadores Biológicos 1295.
- Permita que los 3M™ Attest™ Indicadores Biológicos 1491 y 1492V se enfrien por 10 minutos antes de la activación.

Códigos de referencia de precaución/error* para 3M™ Attest™ Autolectora Dual 490

Código	Problema	Solución
C1	El bloque de incubación no está a la temperatura adecuada	Permita un calentamiento de 30 minutos después de conectar la autolectora.
C2	El IB fue retirado antes de completar la incubación	Recoloque el IB en la misma celda en 10 segundos para prevenir la pérdida de la información recolectada.
C4	Precaución de luz ambiental	Retire la autolectora de la luz solar o luz incandescente.
E8	Error LED	Desconecte la unidad y vuelva a conectarla para eliminar el error. Si el error no desaparece, llame para una reparación o sustitución. No use la celda afectada.
E11	El IB se insertó incorrectamente	Retire el IB e inspeccione para verificar que la tapa está completamente hundida, que la ampolla esté triturada y el medio de cultivo esté en la tira de esporas. Si es necesario, repita los pasos de activación antes indicados.
E12	Error de falla de energía	Asegúrese de que la fuente de energía a la que está conectada la autolectora sea segura. Vuelva a probar el esterilizador con un nuevo IB.
E14	Error de luz ambiental (celda ocupada) El resultado fluorescente no aparece	Consulte el resultado visual opcional de cambio de color de pH para el IB en la celda afectada. Retire la autolectora de la luz solar o luz incandescente para evitar futuros problemas. Retire el IB, después desconecte y reconecte la unidad para eliminar el error.

*Consulte el Manual de Operación para la lista completa de códigos de precaución/error. Para obtener ayuda para resolución de problemas, llame al servicio Solventum al 1-800-292-6298. Contacte a su representante de ventas local en Latinoamérica.



Solventum Medical Surgical
solventum.com

Para más información, visite [solventum.com](https://www.solventum.com)

© Solventum 2026. Solventum y el logotipo S son marcas registradas de Solventum o sus afiliados. 3M y el logotipo de 3M son marcas registradas de 3M. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.