

Applikation



1 Entfernen Sie die Schutzfolie.



2 Positionieren Sie den transparenten Film ohne zu dehnen über der Einstichstelle mit der Kerbe am Katheterhub und modellieren Sie dann den Verband von innen nach außen gut an.



3 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



4 Nutzen Sie den Dokumentationsstreifen gemäß Ihrer hausinternen Vorschriften.

Entfernung



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentationsstreifen und ziehen Sie dann den Verband langsam und in flachem Winkel von der Haut in Richtung der Einstichstelle ab.

Alternativ kann der Verband auch mittels Stretchtechnik entfernt werden.

