

## Applikation



1 Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den sterilen Verband. Tragen Sie vor der Applikation bei Bedarf 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz im Abstand von 2 cm rund um die Einstichstelle auf.



2 Entfernen Sie die Schutzfolie des Verbands und positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle ohne den Verband dabei zu dehnen.



3 Modellieren Sie den Verband von Innen nach Außen mit leichtem Druck an.



4 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



5 Befestigen Sie den breiten Fixierstreifen unterhalb der Katheterlumen.



6 Nutzen Sie den Dokumentationsstreifen gemäß Ihrer hausinternen Vorschriften und sichern Sie die Katheterlumen.

## Entfernung



1 Entfernen Sie zuerst den Dokumentations- und den Fixierstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel in Richtung der Einstichstelle entfernen.



3 Stabilisieren Sie dabei den Katheter mit der anderen Hand um eine Dislokation zu vermeiden.



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
Tel +49 (0)2131 881 9260  
3Mmedica.de@mmm.com  
www.3M.de/medicalsolutions

**3M Österreich GmbH**  
Health Care Business  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel +43 (0)186 68 60  
medizin-at@mmm.com  
www.3Mautria.at/medicalsolutions

**3M (Schweiz) GmbH**  
Health Care Business  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Tel +41 (0)44 724 90 90  
innovation.ch@mmm.com  
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

[www.3m.de/tegaderm](http://www.3m.de/tegaderm)

3M, 3M Science. Applied to Life., Cavilon und Tegaderm sind eingetragene Marken oder Warenzeichen der 3M Company. © 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten. (G) 2021-0062