



3M™ Multipore™ Dry

Medizinisches Rollenpflaster



Entwickelt für die zuverlässige Fixierung von Tuben und Sonden

Bei der anspruchsvollen Fixierung von Tuben und Sonden kommt es auf eine zuverlässige Haftung an. 3M™ Multipore™ Dry wurde speziell für die Sicherung dieser Produkte entwickelt. Das medizinische Rollenpflaster sorgt für eine effektive Fixierung, auch in schwierigen Situationen.



Starke Klebkraft – Hohe initiale Haftung auf trockener Haut.



Einfache Handhabung – Schutzfolie mit Markierung für einfaches Zuschneiden auf die gewünschte Größe.



Innovative Materialeigenschaften – Wasserabweisendes, 2-lagiges Trägermaterial, das schnell trocknet.



Hoher Komfort – Passt sich den anatomischen Herausforderungen an.

Zuverlässige Fixierung

Geeignet für klinische Anwendungen wie z. B.:

- Blasenkatheter
- Nasensonden
- Endotrachealtuben
 - ▶ Zur Verwendung unter trockenen Bedingungen
 - ▶ Die Sicherung des Pflasters und die Schlauchposition sollten routinemäßig überwacht werden
 - ▶ Sollten Flüssigkeiten oder Sekrete auftreten, ist eine Kontrolle besonders wichtig
- Zur Anwendung auf intakter Haut vorgesehen

Material: 2-lagiges Trägermaterial. Ohne Naturkautschuk hergestellt.

3M™ Multipore™ Dry ist kompatibel mit 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz.

Applikationshinweise für die Sicherung von Tuben und Sonden:

- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Haut, als auch der Schlauch trocken und fettfrei sind.
Je nach Einrichtungsprotokoll sollte die Nutzung eines reizfreien Hautschutzes zum Schutz gefährdeter Haut berücksichtigt werden.
- Sobald die Haut trocken ist, können Sie die folgenden Schritte befolgen:



Schneiden Sie das Rollenpflaster auf die gewünschte Größe zu.



Entfernen Sie die Schutzfolie.



Applizieren Sie das Pflaster ohne Dehnung auf der Haut, um Spannungsblasen zu vermeiden.



Wickeln Sie das Tape spiralförmig um den Schlauch, um das Kontaktareal zu vergrößern.



Üben Sie Druck auf das Pflaster aus, um die Haftung zu verbessern.

- Sollten Flüssigkeiten oder Sekrete auftreten, ist eine Kontrolle besonders wichtig.
- Die Sicherung des Pflasters und die Schlauchposition sollten routinemäßig überwacht werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stk./Pkg.	 PZN	 PZN	 Pharma-code	 MiGel
3730-0	1,25 cm x 5 m	12	12650424	4740099	7130786	35.01.09.03.1
3730-1	2,5 cm x 5 m	24	12650430	4740107	7130792	35.01.09.03.1
3730-2	5 cm x 5 m	12	12650447	4740113	1117401	35.01.09.04.1



Solventum
Medical Surgical

AT MedSurg-AT@solventum.com
CH MedSurg-CH@solventum.com
GE MedSurg-GE@solventum.com

3M Health Care ist jetzt Solventum

© Solventum 2024. Das S Logo, Multipore und Cavilon sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
16315