



Cavilon™

Solutions des Soins Cutanés

Simplifier vos besoins d'intégrité cutanée

Prendre en charge la peau abîmée ou lésée

Exemples : lésions d'épaisseur partielle comme : DAI CAT 2A*, déchirures cutanées, peau péristomiale excoriée (ex. iléostomie).

Matières irritantes

Exemples : selles liquides, selles/urine mélangées, fluide gastrique et exsudat de plaie chronique.

J'ai besoin de :
Protéger la peau de :

Humidité et frottements

Peau à risque ou altérée

Exemples : antécédents de lésion récurrente, peau fragile, peau qui macère, exsudat modéré à abondant, intertrigo.

Protection cutanée

Adhésifs

Film protecteur cutané
3M™ Cavilon™ Advanced

Film protecteur cutané
3M™ Cavilon™ NSBF**

Hydrater et protéger

Crème barrière cutanée longue durée
3M™ Cavilon™

Nettoyer et protéger

Lingettes pour les soins liés à l'incontinence 3M™ Cavilon™
Lingettes pour le bain et la toilette 3M™ Cavilon™

*Echelle GLOBIAD
**NSBF : No Sting Barrier Film
Film protecteur cutané non irritant.

Trouver la solution adaptée pour maintenir et restaurer l'intégrité cutanée

Lésions cutanées associées à l'humidité (MASD***)



Dermite associée à l'incontinence (DAI)



Lésion cutanée péristomiale



Peau périlésionnelle altérée



Intertrigo



Escarre



Lésion cutanée liée aux adhésifs médicaux

Prendre en charge la peau abîmée ou lésée

Prendre en charge la dermite associée à l'incontinence (DAI).

Prendre en charge les lésions cutanées péristomiales/ périfistulaires.

Prendre en charge la peau périlésionnelle altérée (p. ex. macération).

Prendre en charge les lésions superficielles liées à l'humidité et aux frottements.

Prendre en charge les lésions cutanées d'épaisseur partielle dans les sites où l'application de pansements est difficile.

Prendre en charge les lésions superficielles (ex. arrachement, déchirures cutanées) liées à l'utilisation d'adhésifs.

Protéger la peau des patients à haut risque

Protéger la peau des patients à haut risque notamment en cas de diarrhée ou d'incontinence mixte.

Protéger la peau autour de stomies digestives ou urinaires, fistules ou trachéotomies.

Protéger la peau autour des plaies à risque (ex. plaies fortement exsudatives comme les ulcères de jambe veineux ou les plaies infectées).

Protéger la peau non infectée de l'humidité et des frottements entre les plis cutanés.

Protéger la peau lésée de l'humidité et des frottements.



Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

Protéger la peau des patients

Protéger la peau des patients à risque.

Protéger la peau des patients à risque.

Protéger la peau des patients à risque.

Protéger la peau intacte de l'humidité et des frottements.

Protéger la peau intacte de l'humidité ou des frottements.

Protéger la peau intacte des produits adhésifs (ex. sparadraps, produits pour plaie et stomie).

Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ NSBF



3M France

Division Soins Critiques et Chroniques

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. 01 30 31 61 61

Fax. 01 30 31 85 51

SAS au capital de 10572672 euros

RCS Pontoise 542078555.

www.3mfrance.fr/medical



Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio.



Lorsque vous avez besoin d'hydrater une peau très sèche ou de protéger une peau présentant un faible risque de lésion, envisagez d'utiliser la crème de protection cutanée longue durée 3M™ Cavilon™.

Crème barrière cutanée longue durée 3M™ Cavilon™



Lingettes pour les soins liés à l'incontinence 3M™ Cavilon™

Lingettes pour le bain et la toilette 3M™ Cavilon™

Lorsque vous avez besoin de nettoyer, d'hydrater et de protéger la peau de patients incontinents à faible risque de lésion, privilégiez l'utilisation de lingettes pour les soins liés à l'incontinence 3M™ Cavilon™.

Pour les soins habituels de la toilette et du bain, choisissez les lingettes pour la toilette 3M™ Cavilon™.

***Moisture-Associated Skin Damage (MASD) - C3SD-000939 – Juillet 2018. 3M et Cavilon sont des marques déposées de 3M. La crème 3M™ Cavilon™ et le film protecteur cutané en spray 3M™ Cavilon™ NSBF sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. Les applicateurs 3M™ Cavilon™ NSBF sont des DM de classe I stérile marquage CE0086. Le protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l'Oise 95006 Cergy Pontoise Cedex.