



Curos™

Disinfecting Port
Protectors

Vejledning

3M™ Curos™ til Tego®

Desinficerende prop til Tego® hæmodialysemembraner

Desinficerer på et minut – beskytter i op til syv dage.



Træk

folien af 3M™ Curos™ Desinficerende prop til Tego® hæmodialysemembran.



Tryk og drej

Curos Desinficerende prop til Tego® hæmodialysemembran med uret til enden af hæmodialysemembranen.

- ▶ Hvis den nålefri membran er meget snavset, skal den rengøres med en spritswab med 70 % isopropylalkohol, før proppen anvendes
- ▶ Undlad at bruge proppen, hvis forseglingen er brudt, overrevet eller punkteret, eller hvis svampen ser tør ud
- ▶ Proppen skal sidde på den nålefri membran i mindst et minut og kan blive siddende på i syv dage, hvis den ikke fjernes
- ▶ Den nålefri membran kan tilgås med det samme efter fjernelse af Curos desinficerende prop til Tego® hæmodialysemembran, som har siddet på plads i mindst et minut
- ▶ Sæt altid en ny Curos desinficerende prop til Tego® hæmodialysemembran på hæmodialysemembranen efter hver brug
- ▶ Bortskaf Curos desinficerende prop til Tego® hæmodialysemembran efter hver brug
- ▶ Følg hospitalets protokol for desinficering af nålefri membraner, hvis du foretager sekventiel adgang

Advarsel: Må kun bruges på Tego® hæmodialysemembraner for at minimere risikoen for skader.

Forsigtig: Potentiel kvælningsfare.