



Curos™

Disinfecting Port
Protectors

Slik bruker du

3M™ Curos™ for Tego®

Desinfeksjonshette for Tego® Hemodialysekoblinger

Desinfiserer på 1 minutt – beskytter i opptil 7 dager



Dra av

folien på 3M™ Curos™ desinfeksjonshetten
for Tego® Hemodialysekobling.



Trykk og vri

Curos desinfeksjonshette for Tego®
hemodialysekoblinger med klokkeretningen
på enden av hemodialysekoblingen.

- ▶ Hvis den nåleløse koblingen er svært tilsmusset, må du rengjøre den med 70 % isopropylalkohol før du bruker hetten
- ▶ Ikke bruk hetten hvis forseglingen er brutt, revet opp, punktert eller om svampen ser tørr ut
- ▶ Hetten må forbli på den nåleløse koblingen i minimum 1 minutt, og kan forbli på i syv dager hvis den ikke fjernes
- ▶ Du kan umiddelbart få tilgang til den nåleløse koblingen etter fjerning av Curos desinfeksjonshetten for Tego® hemodialysekobling som har sittet på i minst 1 minutt
- ▶ Sett alltid en ny Curos desinfeksjonshette for Tego® hemodialysekoblinger på hemodialysekoblingen etter hver bruk
- ▶ Kast Curos desinfeksjonshetten for Tego® hemodialysekoblingen etter hver bruk
- ▶ Ved påfølgende tilganger, følg sykehusets prosedyre for desinfisering av nåleløse koblingen

Advarsel: må kun brukes på Tego® Hemodialysekoblinger for å unngå potensielle skader.

Forsiktig: potensiell kvelningsfare.

3M.co.uk/Medical

3M Medical Solutions Division
3M Norge AS
Tærudgata 16
2001 Lillestrøm
Norway

Virkestoff: 70 % isopropylalkohol (IPA). Kun til engangsbruk.
Kun på resept. Denne enheten er ikke laget med naturlig
gummlateks eller mykneren dietylheksylftalat (DEHP).
Se nåværende merking av enheten for indikasjoner for bruk,
advarsler og produktdetaljer.

GF532

Tego® er et varemerke som tilhører ICU Medical, Inc.
3M og Curos er varemerker som tilhører 3M Company.
© 3M 2021. Med enerett.
OMG79664.