



Curos™

Disinfecting Port
Protectors

Vejledning

3M™ Curos™

Desinficerende prop til nålefri membraner

**Desinficerer på et minut – beskytter nålefri membraner
i op til syv dage.**



Træk

folien af 3M™ Curos™ Desinficerende prop.



Tryk og drej

Curos Desinficerende prop med uret til enden
af den nålefri membran.

- ▶ Hvis den nålefri membran er meget snavset, skal den rengøres med en spritswab med 70 % isopropylalkohol, før proppen anvendes
- ▶ Undlad at bruge proppen, hvis forseglingen er brudt, overrevet eller punkteret, eller hvis svampen ser tør ud
- ▶ Proppen skal sidde på den nålefri membran i mindst et minut og kan blive siddende på i syv dage, hvis den ikke fjernes
- ▶ Den nålefri membran kan tilgås med det samme efter fjernelse af Curos desinficerende prop, som har siddet på plads i mindst et minut
- ▶ Sæt altid en ny Curos desinficerende prop på den nålefri membran efter hver brug
- ▶ Bortskaf Curos desinficerende prop efter hver brug
- ▶ Følg hospitalets protokol for desinficering af nålefri membraner, hvis du foretager sekventiel adgang

Advarsel: Må kun bruges på nålefri membraner for at minimere risikoen for skader.

Forsigtig: Potentiel kvælningsfare.

[3M.dk/ipd](https://3m.dk/ipd)

3M Medical Solutions Division
3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

Aktiv ingrediens: 70 % isopropylalkohol (IPA) Kun til engangsbrug. Denne enhed er ikke fremstillet af latexnaturgummi eller blødgørende diethylhexylphthalat (DEHP). Se den aktuelle mærkning på enheden for at finde en brugsanvisning, advarsler og produktoplysninger.

GF531

3M og Curos er varemærker tilhørende 3M Company.
© 3M 2021. Alle rettigheder forbeholdes.
OMG79664.