



Curoos™

Disinfecting Port
Protectors

Slik bruker du

3M™ Curoos™

Desinfeksjonshette for nåleløse koblinger

**Desinfiserer på 1 minutt – beskytter nåleløse koblinger
i opp til syv dager.**



Dra av

folien på 3M™ Curoos™ desinfeksjonshetten.



Trykk og vri

Curoos desinfeksjonshetten med klokkeretningen
på enden av den nåleløse koblingen.

- ▶ Hvis den nåleløse koblingen er svært tilsmusset, må du rengjøre den med 70 % isopropylalkohol før du bruker hetten
- ▶ Ikke bruk hetten hvis forseglingen er brutt, revet opp, punktert eller om svampen ser tørr ut
- ▶ Hetten må forbli på den nåleløse koblingen i minimum 1 minutt, og kan forbli på i syv dager hvis den ikke fjernes
- ▶ Du kan umiddelbart få tilgang til den nåleløse koblingen etter fjerning av Curoos desinfeksjonshetten som har sittet på i minst 1 minutt
- ▶ Sett alltid en ny Curoos desinfeksjonshette på den nåleløse koblingen etter hver bruk
- ▶ Kast Curoos desinfeksjonshetten etter hver bruk
- ▶ Ved påfølgende tilganger, følg sykehusets prosedyre for desinfisering av nåleløse koblingen

Advarsel: må kun brukes på nåleløse koblinger for å unngå potensielle skader.

Forsiktig: potensiell kvelningsfare.

[3M.co.uk/Medical](https://3m.co.uk/Medical)

3M Medical Solutions Division
3M Norge AS
Tærudgata 16
2001 Lillestrøm
Norway

Virkestoff: 70 % isopropylalkohol (IPA). Kun til engangsbruk.
Denne enheten er ikke laget med naturlig gummilateks eller
mykneren dietylheksylftalat (DEHP). Se nåværende merking
av enheten for indikasjoner for bruk, advarsler og produktdetaljer.

GF531
3M og Curoos er varemerker som tilhører 3M Company.
© 3M 2021. Med enerett.
OMG79664.