

3M™ Cuрос™ Stopper

Desinficerende prop til åbne hun-luer

**Desinficerer på et minut – beskytter åbne hun-luer
i op til syv dage.**



Træk




Tryk og drej på kateterspidsen


- ▶ Kontrollér, at stophanen eller kateterklemmerne er i lukket position, før du anvender 3M™ Cuрос™ Desinficerende prop til åbne hun-luer
- ▶ Hvis den åbne hun-luer er tydeligt snavset, skal den rengøres med en spritswab med 70 % isopropylalkohol, før proppen anvendes
- ▶ Undlad at bruge proppen, hvis forseglingen er brudt, overrevet eller punkteret
- ▶ Tag proppen ud af folien
- ▶ Når folien er fjernet, skal du trykke og dreje enheden med uret oven på enden af den åbne hun-luer, indtil de er tæt forbundne
- ▶ Proppen skal sidde på plads i mindst et minut og kan blive siddende på i syv dage, hvis den ikke fjernes
- ▶ Den åbne hun-luer kan tilgås med det samme efter fjernelse af Cuрос Stopper desinficerende prop, som har siddet på plads i mindst et minut
- ▶ Bortskaf proppen efter hver brug – proppen må ikke genbruges
- ▶ Den nye prop skal sættes på den åbne hun-luer efter hver brug
- ▶ Følg hospitalets protokol for desinficering af åbne hun-luer, hvis du foretager sekventiel adgang

Advarsel: Bruges kun åbne hun-luer, og sørg for, at proppen er forsvarligt fastgjort, for at minimere risikoen for skader.

Forsigtig: Potentiel kvælningsfare.

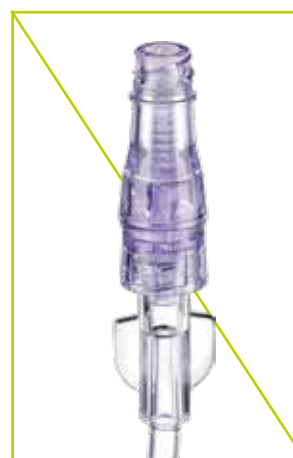

**Må ikke
bruges på
nålefri
membraner**

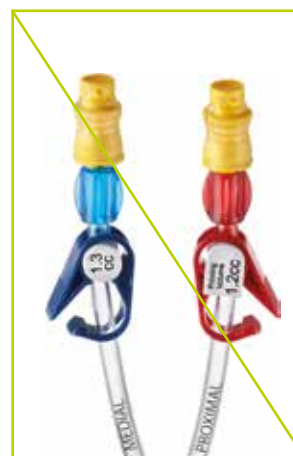

**Må ikke
bruges
på Tego®
hæmo-
dialyse-
membraner**