



Cavilon™

Skin Care Solutions



Skydda huden vid användning av andningsskydd.

Att välja hudskyddsprodukt.

Det som är avgörande när du ska välja en hudskyddsprodukt för att skydda huden under ett andningsskydd är att välja en sådan som inte stör andningsskyddet och dess funktion. Detta betyder att du ska välja en hudskyddsprodukt som:

- ▶ inte försämrar andningsskyddets funktion och passform
- ▶ inte lossnar från huden och riskerar att fastna på andningsskyddet
- ▶ skyddar huden från friktion och fukt (vattentät)
- ▶ andas, så att fukt kan avdunsta från huden
- ▶ inte behöver tas bort eller tvättas av
- ▶ har en låg risk för att orsaka dermatit

På grund av risken för nedsatt funktion avseende tätning och filtrering på 3M:s andningsskydd, rekommenderar 3M inte att vaselin, salvor, tjocka barriärkrämer eller förband som t. ex. polyuretanskum och hydrokolloider används.

**3M™ Cavilon™
No Sting
barriärfilm**



**3M™ Cavilon™
Advanced
hudskyddsmedel***

Proaktivt hudskydd.

3M™ Cavity™ No Sting barriärfilm skyddar hel hud från fukt och friktion. När barriärfilmen används på rätt sätt kommer den inte att störa tillpassningen av 3M:s andningsskydd.

Appliceringsguide

- 1 1 ml applikator ska användas.
- 2 Produkten ska appliceras på ren, torr hud över de ytor där andningsskyddet troligtvis kan orsaka friktion och/eller där fukt kan förekomma, t. ex. näsryggen, kinderna, öronen eller pannan m.m. Barriärfilmen kan användas i ansiktet, men får inte användas i eller i närheten av ögonen.



- 3 Barriärfilmen måste få torka helt (minst 90 sekunder). Detta låter produktens vätska avdunsta och torka på huden. Säkerställ att barriärfilmen inte känns kladdig innan andningsskyddet tas på. **I samband med appliceringen av barriärfilmen kan en stark doft upplevas. Doften kommer att försvinna när produkten torkar.**
- 4 Starta med en applicering per dag. Om det bildas flera lager av barriärfilm på huden rekommenderar vi att minska antal appliceringar till t. ex. 3 gånger/vecka.
- 5 Cavity No Sting barriärfilm kan tas bort med medicinskt häftämnesborttagningsmedel.



Vid användning av andningsskydd ska alltid tillverkarens modellspecifika användarinstruktioner följas. Detta ska även inkludera en kontroll av täthet varje gång ett andningsskydd tas på.

Läs mer i produktens bifogade information för komplett bruksanvisning, indikationer för användning, kontraindikationer, försiktighet och varningar.

Proaktivt på skadad hud.

3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel kan användas för att skydda skadad hud, t. ex. vid skavsår från friktion eller annan ytlig hudskada.



Appliceringsguide


- 1 Använd Cavilon Advanced hudskyddsmedel applikator.
- 2 Produkten kan appliceras på områden med rodnad eller ytliga hudskador, t. ex. näsryggen, kinderna, öronen eller pannan m.m. Produkten får inte användas i eller i närheten av ögonen.
- 3 Produkten ska appliceras i ett tunt lager.



Observera

Följande steg rekommenderas för att minimera att vätskan droppar eller bildar pölar i samband med applicering:

- 1 Öppna och håll förpackningen i närheten.
- 2 Aktivera applikatorn och låt vätskan rinna ut i skumsvampen.
- 3 Tryck skumsvampen mot förpackningens vita omslag för att få bort överflödigt vätska.

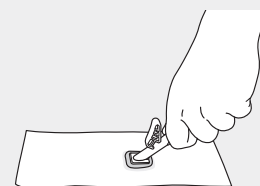

- 4 Applicera sedan enligt instruktionerna.

- 4 Produkten måste få torka helt (minst 90 sekunder). Detta låter produktens vätska avdunsta och torka på huden. Säkerställ att huden inte känns kladdig innan andningsskyddet tas på. **I samband med appliceringen av hudskyddsmedlet kan en stark doft upplevas. Doften kommer att försvinna när produkten torkar.**
- 5 Vi rekommenderar applicering 2-3 gånger/vecka. Om det bildas flera lager av barriärfilm på huden rekommenderar vi att minska antal appliceringar till 1-2 gånger/vecka.
- 6 Cavilon Advanced hudskyddsmedel kan tas bort med medicinskt häftämnesborttagningsmedel som innehåller hexametyldisiloxan eller silikon.



Vid användning av andningsskydd ska alltid tillverkarens modellspecifika användarinstruktioner följas. Detta ska även inkludera en kontroll av täthet varje gång ett andningsskydd tas på.

Läs mer i produktens bifogade information för komplett bruksanvisning, indikationer för användning, kontraindikationer, försiktighet och varningar.