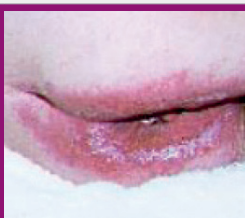


Den optimala lösningen för behandling av fuktrelaterade hudskador (MASD).

Guide för behandling av inkontinensrelaterad dermatit (IAD)

	Kliniska tecken**	Rengöra huden:	Skydda huden:	När:	Hur mycket:
Förebyggande	Ingen rodnad huden är intakt men med förhöjd risk för IAD	 Rengör huden med pH-neutral sköljfri tvättkräm eller ¹ 3M™ Cavilon™ Barriärtvättsservetter ¹	 3M™ Cavilon™ Barriärkräm ³  3M™ Cavilon™ Barriärtvättsservetter ¹	 Morgon och kväll	 En ärtas storlek
Behandlande	Röd* men intakt hud (mild IAD)	 Rengör huden med pH-neutral sköljfri tvättkräm eller ¹ 3M™ Cavilon™ Barriärtvättsservetter ¹	 3M™ Cavilon™ Barriärkräm	 Morgon och kväll	 En ärtas storlek
	Röd och skadad hud* (måttlig till svår IAD)	 Rengör huden med pH-neutral sköljfri tvättkräm eller vatten ²	 3M™ Cavilon™ Advanced Hudskyddsmedel	 2x per vecka	 Applicera ett jämnt lager  Låt torka tills dess att ytan är torr (minst 30 s)
Hög risk	Hög risk för att utveckla IAD t.ex. vid blandad inkontinens och frekventa episoder	 Rengör huden med pH-neutral sköljfri tvättkräm eller vatten ²	 3M™ Cavilon™ Advanced Hudskyddsmedel	 2x per vecka	 Applicera ett jämnt lager  Låt torka tills dess att ytan är torr (minst 30 s)

¹ Om det inte finns några hudrengöringsmedel tillgängliga är rengöring med en mild pH-neutral tvål och vatten ett alternativ. Om mild tvål inte finns tillgänglig är rengöring med vatten ett föredrag. (Ref Bockman D et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015.

² Cavilon Advanced hudskyddsmedel ska inte användas i kombination med andra hudbarriärer t.ex. dimetikon.

³ Om du använder Cavilon Barriärtvättsservetter, använd ytterligare hudskyddsmedel (Cavilon Barriärkräm) om hudrodnaden tilltar eller om det föreligger risk för hudnedbrytning.

* Eller blekare, mörkare, lila, mörkröd eller gul hos patienter med mörkare hudtoner.

** Från: AD Severity Categorisation från Bockman D et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence-associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015.

Guide för behandling av övriga fuktrelaterade hudskador (MASD) och MARSI

Kliniska tecken	Val av produkt:	När:	Hur mycket:
 Skydd runt sårkanterna  Skydd runt stomier och tuber  Skydd mot MARSI  Intertrigo/ITD* (MASD i hudveck)	 3M™ Cavilon™ No Sting Barriärfilm	Vid varje förbandsbyte ***ITD: Applicera med 24 h mellanrum. Frekvensen kan reduceras till 48–72 h mellanrum i takt med att huden läker.	 Applicera ett jämnt lager

*MARSI = Häftämnesrelaterade hudskador (Medical Adhesive-Related Skin Injury).

OBS Överväg alltid att använda 3M™ Cavilon™ Advanced Hudskyddsmedel för måttliga till allvarliga hudskador eller för hud med hög risk för nedbrytning.

Optimalt hudskydd

3M™ Cavity™ Skin Care Solutions

3M™ Cavity™ Tvättsservetter

3M™ Cavity™ Barriärtvättsservetter



Cavity tvättsservetter

För daglig tvätt i sängen: en kombination av hudrengöring och återfuktning i en mjuk och snabbtorkande tvättsservett. Tvätta varje kroppsdel med en separat tvättsservett. Fri från parfym, tvål, alkohol och parabener.

Cavity barriärtvättsservetter

Innehåller 3% dimetikon vilket ger en effektiv barriär mot fukt och kroppsvätskor. Använd efter varje inkontinens episod för att rengöra, skydda och återfukta huden. Fri från parfym, tvål, alkohol och parabener. CE-märkt som medicinteknisk produkt.

3M Art.no	Beskrivning	Storlek	Förpackning
9272	3M™ Cavity™ Tvättsservetter	8 servetter/fp	12 fp/lev.fp
9274	3M™ Cavity™ Barriärtvättsservetter	8 servetter/fp	12 fp/lev.fp

3M™ Cavity™ Barriärkräm



Cavity Barriärkräm är en koncentrerad, doftfri och fuktgivande barriärkräm som skapar en osynlig hudbarriär som andas och återfuktar huden samt skyddar mot irriterade effekter av kroppsvätskor som urin och/eller avföring.

- Kan användas på både skadad och intakt hud¹
- Tål tvätt – inget behov av frekventa återappliceringar¹
- Behövs inte avlägsnas mellan appliceringar
- Påverkar inte absorptionsförmågan hos inkontinensskydd, kladdar inte heller av sig på sängkläder²
- Påverkar inte vidhäftningsförmågan hos förband och kirurgiska tejper¹

3M Art.no	Storlek	Förpackning
3391G	28g per tub	12 tuber/fp
3392G	92g per tub	12 tuber/fp
3392GS	2g kuvert	20 kuvert/fp

3M™ Cavity™ No Sting Barriärfilm



Den ursprungliga alkoholfria barriärfilmen som bildar en, transparent skyddande barriär på huden till skydd mot friktion, häftämnesheter relaterade hudskador och kroppsvätskor. Barriären låter huden andas.

- Svider inte, inte ens på skadad eller irriterad hud³
- Påverkar inte absorptionsförmågan hos inkontinensskydd⁴
- Transparent – för enkel övervakning av huden
- Påverkar inte vidhäftningsförmågan hos förband eller kirurgisk tejp¹

3M Art.no	Storlek	Förpackning
3343N	1 ml applikator	25 applikatorer/fp
3345N	3 ml applikator	25 applikatorer/fp
3346N	28 ml sprayflaska, pumpverkan	12 flaskor/fp

3M™ Cavity™ Advanced Hudskyddsmedel



En mycket tålig, ultratunn, transparent barriär som skyddar mot skadliga effekter av kroppsvätskor. Denna barriär skapar en skyddande miljö som stöder läkning och minskar smärtan i samband med hudskador som t.ex. IAD.

- Endast två appliceringar/vecka⁵
- Fäster på våt, vätskande, skadad hud⁵
- Applikator för engångsbruk minskar potentialen för korskontaminering
- Minskar smärtan vid behandling av IAD⁵

3M Art.no	Storlek	Förpackning
5050G	2.7ml applikator	20 applikatorer/fp
5050G-4P	2.7ml applikator	4 applikatorer/fp

1 3M data on file

2 Hart J, (2002) Assessment of the incontinence pad blocking potential of Cavity DBC compared with Sudocrem and Zinc and Castor oil. *Nursing Scotland* 2002, Issue July/August.

3 Arrowsmith, M, Schuren J, (2005) Laboratory Studies and general characteristics of Cavity skin care products, 3M data on file

4 Zehrer C, Newman D, Grove G. (2005) Assessment of Diaper – Clogging Potential of Petrolatum Moisture Barriers. *Ostomy Wound Management* 51 (12) 54–58

5 Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nursing*. 2017. 44(2):172–180.