



Cavilon™

lösningar för hud- och sårbehandling

3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel

Effektivt skydd av peristomal hud.

Skyddar och förebygger vid stomivård.

Påsen måste sitta säkert för att stomin ska fungera vilket kan vara svårt eller nära nog omöjligt om huden är skadad. Detta kan bero på att huden exponerats för fukt och irriterande ämnen.¹ Icke-allergisk dermatit, peristomal MASD, (fuktrelaterad hudskada) utgör upp till 70 % av alla peristomala komplikationer,¹ från måttlig irritation till allvarlig erosion.²

Fördelarna med den unika sammansättningen i Cavilon Advanced hudskyddsmedel:



Skapar en mycket tålig barriär³ som är framtagen för att tåla frätande irriterande ämnen, även flytande avföring.



Fäster på våt, vätskande, skadad hud⁴ och skapar en miljö som möjliggör läkning¹ så att påsen kan fästa.



Mindre behov av tidskrävande behandling av sårig hud.



Ileostomi med allvarligt skadad peristomal öppning.

3M™ Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel

Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel kan användas för olika slags behov. Utöver stomi för avföring eller urin kan det användas till att behandla den skadade och såriga omgivande huden:

① Fistlar

③ Gastrostomier

② Trakeostomier

④ Jejunostomier



Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel finns i två storlekar för att uppfylla olika slags behov.

Vetenskapen om hudskydd.

Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel har en unik sammansättning som gör att det passar vart och ett av de olika användningsområdena. Tack vare 3M:s vetenskap och utveckling har vi lyckats utveckla en unik produkt med denna egenskap.

En unik polymer

Den elastomeriska polymeren skapar en hinna som kan sträckas och formas så att den inte spricker som vissa andra barriärfilmer.⁵



Revolutionerande fäste

Systemet med polymer-cyanoakrylat gör att Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel kan fästa på skadad, fuktig och vätskande hud. Därigenom skapas en miljö som avvisar retande ämnen och gynnar både läkning och komfort.⁴



3M™ Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel 5050G

2,7 ml = A4-storlek
applikator ungefärlig täckning



3M™ Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel 5051G

0,7 ml = vykortsstorlek
applikator ungefärlig täckning

Beställningsinformation

3M™ Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel

3M-artikelnummer	Beskrivning	Antal/förpackning
5050G4P	2,7 ml skumapplikator (steril)	4
5050G	2,7 ml skumapplikator (steril)	20
5051G	0,7 ml skumapplikator (steril)	20

Om du vill ha mer information om Cavityon™ Advanced hudskyddsmedel kan du gå in på www.3msverige.se/EndIAD eller kontakta en produktspecialist på 3M Medical Solutions.

1 Gray M, Colwell JC, Doughty D, Goldberg M, Hoeflok J, Manson A, et al. Peristomal moisture-associated skin damage in adults with fecal ostomies: a comprehensive review and consensus. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 2013; 40: 389–99.

2 Salvadale G. Peristomal skin complications. In Carmel, J. et al eds. *Wound, Ostomy, Continence Nurses Society Core Curriculum-Ostomy Management.* Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016: 176.

3 Whitely and Sinclair. A Review of Peristomal Skin Complications after the Formation of an Ileostomy, Colostomy or Ileal Conduit. *World Council of Enterostomal Therapists Journal.* 2010; 30(3): 23–29.

4 Brennan MR, Milne CT, Agrell-Kann M, Ekholm BP. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nursing.* 2017. 44(2): 172–180.

5 3M data på fil. EM-05-013827.

3M Svenska AB

Herrjärva torg
170 67 Solna
08 - 92 21 00

www.3M.se/msd

3M och Cavityon är varumärken som tillhör 3M Company.
© 3M 2020. Med ensamrätt. GF210. OMG109411.

