



3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Systèmes de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}


Guide de poche sur l'application et le retrait

Application sur une jambe


1^{ère} couche

La couche de confort interne


L'application du Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} peut être facilement ajustée pour obtenir un degré de compression souple et soutenu pour diverses tailles et formes de membres.

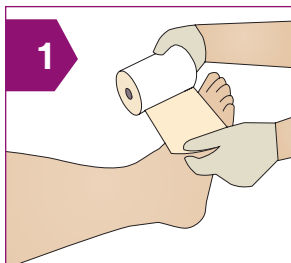

En gardant le pied en position de dorsiflexion, commencer l'application par un enroulement circulaire à la base des orteils, en commençant par la cinquième tête du métatarsien.

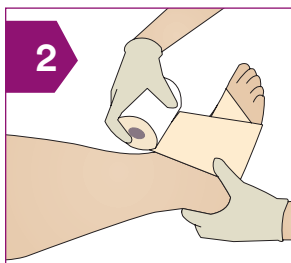


Le deuxième enroulement circulaire doit croiser celui du dessus du pied de sorte que le milieu de la largeur du bandage couvre approximativement la partie articulée de l'articulation de la cheville.

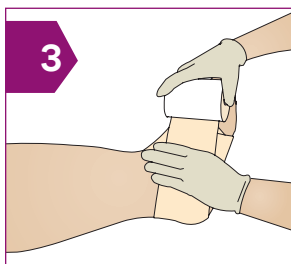


Faire passer cet enroulement autour de l'arrière du talon et l'appliquer par-dessus le dessus du pied à l'endroit où il chevauche le matériau sous-jacent.


ambe très galbée

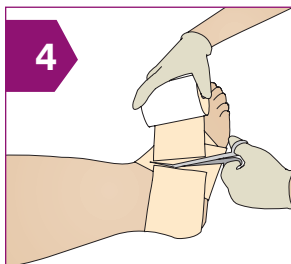

Couper le bandage et appuyer dessus délicatement pour le faire tenir en place.

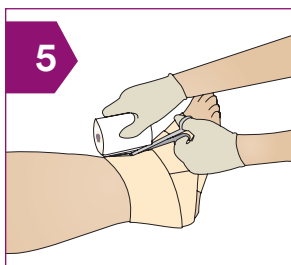

Appliquer le tour suivant en commençant le rouleau à l'endroit de la coupe précédente. En gardant un chevauchement minimal, enrouler le bandage autour de la jambe. Le couper lorsqu'il chevauche le matériau sous-jacent.

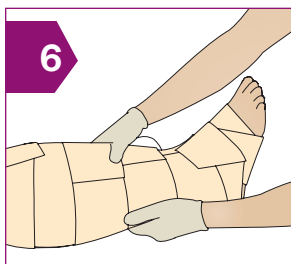


Remonter le long de la jambe avec des enroulements individuels, en utilisant la même technique. Terminer l'application à la tête fibulaire ou juste en dessous de l'arrière du genou. Couper l'excès de matériau. Exercer une légère pression à l'extrémité du bandage et le long de la jambe pour veiller à ce qu'il tienne fermement pendant l'application de la couche de compression.


Pour les patients moins tolérants à la compression, envisager l'utilisation du Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}.

2^e couche


La couche de compression externe

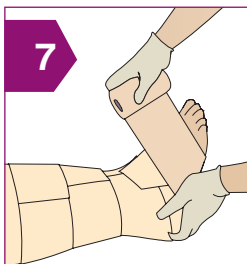


Appliquer cette couche à pleine extension tout au long de son application. Tenir le rouleau près du pied et du membre tout au long de l'application pour une compression contrôlée et uniforme. En gardant le pied en position de dorsiflexion, commencer l'application par un enroulement circulaire à la base des orteils, en commençant par la cinquième tête du métatarsien.

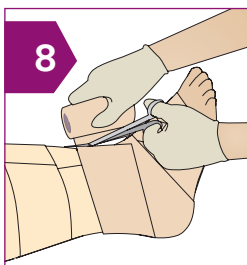


En utilisant la technique de « bandage croisé », ramener le rouleau sur le dessus du pied, sur le bas du pied et remonter jusqu'à l'arrière du talon. Effectuer deux ou trois enroulements croisés autour de la cheville, en veillant à ce que tout le talon soit couvert.

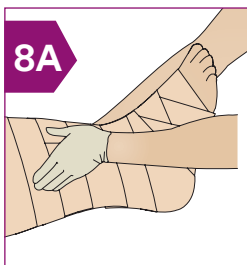

Au besoin, pour la souplesse et une couverture uniforme, il convient de couper le matériau de compression et de l'enrouler avec des tours individuels le long du pied et de la jambe à 50 % de chevauchement, en veillant à bien appuyer et mouler chaque couche suivante.

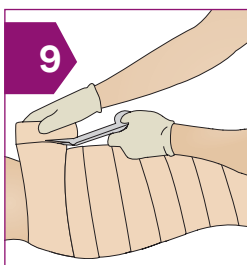

Terminer l'application du bandage à la tête fibulaire, ou juste en dessous de l'arrière du genou et au même niveau que le bord supérieur de la couche de confort. Couper tout excès de matériau. Appuyer délicatement et mouler toute la surface de l'application de bandage.

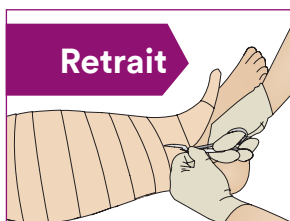

Le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} peut être retiré avec des ciseaux de bandage ou en le déroulant.

IPCB (indice de pression systolique cheville/bras)

Utiliser ce tableau comme guide pour interpréter les valeurs de l'IPCB par rapport à la compression.

		Pression systolique au bras (mm de Hg)											
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
Pression systolique à la cheville (mm de Hg)	20	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	Ischémie très sévère
	30	0,30	0,27	0,25	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	
	40	0,40	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	
	50	0,50	0,45	0,42	0,38	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	
	60	0,60	0,55	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,33	0,32	0,30	Ischémie sévère
	70	0,70	0,64	0,58	0,54	0,50	0,47	0,45	0,41	0,39	0,37	0,35	
	80	0,80	0,73	0,67	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44	0,42	0,40	
	90	0,90	0,82	0,75	0,69	0,64	0,60	0,56	0,53	0,50	0,47	0,45	
	100	1,00	0,91	0,83	0,77	0,71	0,67	0,63	0,59	0,56	0,53	0,50	Ischémie modérée
	110	1,10	1,00	0,92	0,85	0,79	0,73	0,69	0,65	0,61	0,58	0,55	
	120	1,20	1,09	1,00	0,92	0,86	0,80	0,75	0,71	0,67	0,63	0,60	
	130	1,30	1,18	1,08	1,00	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65	
	140	1,40	1,27	1,17	1,08	1,00	0,93	0,88	0,82	0,78	0,74	0,70	Ischémie légère
	150	1,50	1,36	1,25	1,15	1,07	1,00	0,94	0,88	0,83	0,79	0,75	
	160	1,60	1,45	1,33	1,23	1,14	1,07	1,00	0,94	0,89	0,84	0,80	
	170	1,70	1,55	1,42	1,31	1,21	1,13	1,06	1,00	0,94	0,89	0,85	
Normale	180	1,80	1,64	1,50	1,38	1,29	1,20	1,13	1,06	1,00	0,95	0,90	Normale
	190	1,90	1,73	1,58	1,46	1,36	1,27	1,19	1,12	1,06	1,00	0,95	
	200	2,00	1,82	1,67	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,11	1,05	1,00	

IPCB < 0,5 : ischémies très sévère et sévère

Ne pas utiliser de compression

IPCB de 0,5 à 0,8 : ischémies modérée et légère

Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}

IPCB ≥ 0,8 : normal

Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC},
Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}

Énoncé de position sur l'utilisation de l'indice de pression systolique cheville/bras dans l'évaluation des patients atteints d'une maladie vasculaire périphérique. Un énoncé de consensus élaboré par la Division de normalisation de la Société de la radiologie interventionnelle.

Des indices de pression systolique cheville/bras aussi élevés que 1,10 sont normaux; les valeurs anormales sont celles inférieures à 1,0.


La majorité des patients souffrant de claudication présentent des indices de pression systolique cheville/bras entre 0,3 et 0,9. Une douleur au repos ou une maladie occlusive sévère surviennent généralement avec un IPCB inférieur à 0,50. Les indices inférieurs à 0,20 sont associés à des membres ischémiques ou gangréneux.

SACKS, D., M.D., et coll. *J. Vasc. Interv. Radiol.*, vol. 14, n° S389 (2003).


Application de base

1^{ère} couche


La couche de confort interne

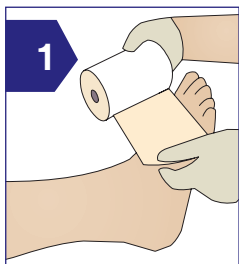


Appliquer en plaçant la face en mousse contre la peau, en utilisant suffisamment de tension pour épouser la forme de la jambe avec un **chevauchement minimal**. En gardant le pied en position de dorsiflexion, commencer l'application par un enroulement circulaire à la base des orteils, en commençant par la cinquième tête du métatarsien.

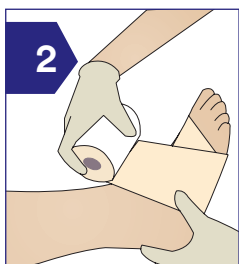

Le deuxième enroulement circulaire doit croiser le dessus du pied de sorte que le milieu de la largeur du bandage couvre approximativement la partie articulée de l'articulation de la cheville.

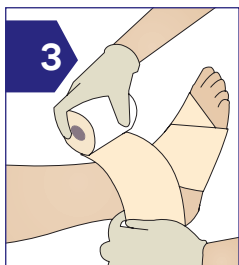


L'enroulement suivant doit passer par-dessus l'arrière du talon. La surface plantaire postérieure du pied n'est pas complètement recouverte.

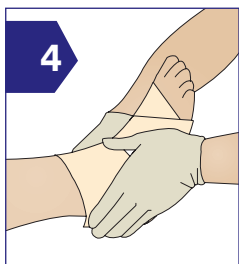


Il peut y avoir un petit pli de matériau de couche de confort dans la zone du tendon d'Achille : guider ce pli hors de la zone du tendon d'Achille et l'étendre dans la zone convexe adjacente. Ce pli s'applatira sans difficulté et sans causer de douleur ou d'inconfort lorsqu'il sera recouvert par la couche de compression.


Les directives d'application et de retrait sont les mêmes pour le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} et le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}.

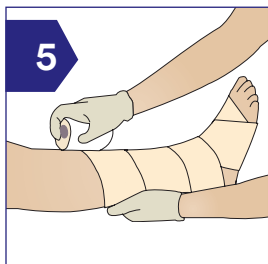


Remonter le long de la jambe jusqu'au-dessous de la tête fibulaire, ou juste en dessous de l'arrière du genou, avec un **chevauchement minimal**. Utiliser suffisamment de tension pour épouser la forme de la jambe.

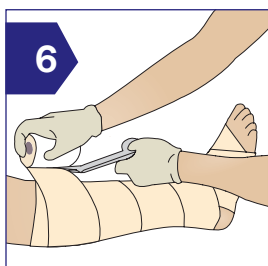

Couper l'excès de matériau.

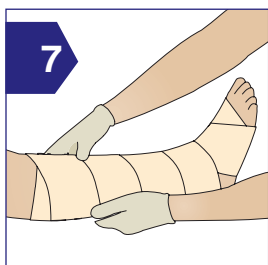


Exercer une légère pression à l'extrémité du bandage pour veiller à ce qu'il tienne fermement pendant l'application de la couche de compression.

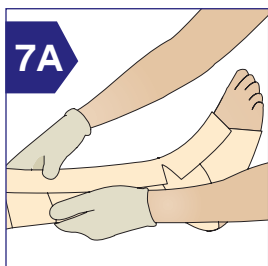


Pour les patients présentant des proéminences osseuses vulnérables, telles que la crête tibiale ou le dessus du pied, couper un morceau de matériau confort et le placer sur le dessus du pied, en l'étendant le long de la jambe pour protéger la crête tibiale. Couper une fente de chaque côté de la bande pour le mouler aux contours de la cheville. Appuyer délicatement pour le mettre en place.

2^e couche


La couche de compression externe

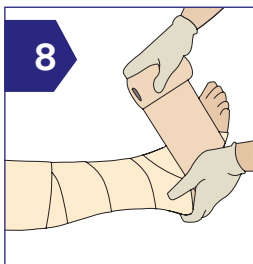


Appliquer à pleine extension. Tenir le rouleau près du pied et du membre tout au long de l'application pour une compression contrôlée et uniforme. En gardant le pied en position de dorsiflexion, commencer l'application par un enroulement circulaire à la base des orteils, en commençant par la cinquième tête du métatarsien.

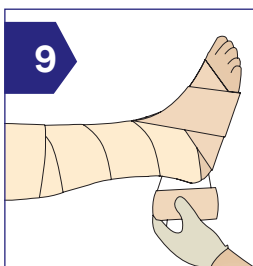


Le deuxième enroulement circulaire doit croiser le dessus du pied et passer autour de l'arrière du talon.

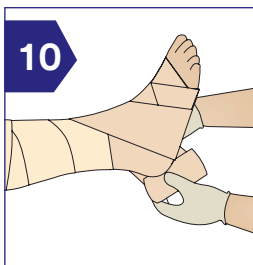


En utilisant la technique de « bandage croisé », ramener le rouleau sur le dessus du pied, sur le bas du pied et remonter jusqu'à l'arrière du talon. Effectuer deux ou trois enroulements croisés autour de la cheville, en veillant à ce que tout le talon soit couvert.

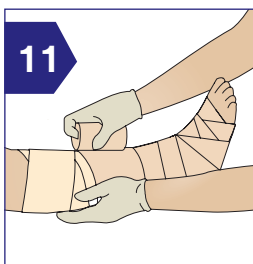

Remonter le long de la jambe avec un chevauchement de 50 % pour couvrir toute la couche de confort interne. Maintenir un étirement uniforme tout au long du processus.

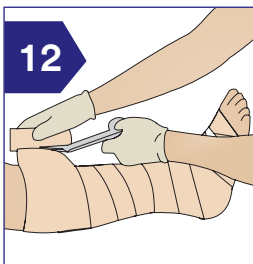


Terminer le bandage à la tête fibulaire ou juste en dessous de l'arrière du genou et au même niveau que le bord supérieur de la couche de confort. Couper tout excès de matériau.

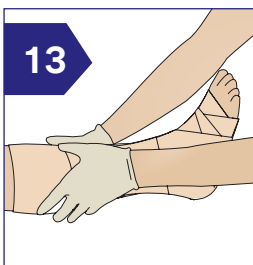

Appuyer délicatement et mouler toute la surface de l'application de bandage. Cela garantira que les deux couches se lieront fermement, ce qui aide à réduire le glissement.

En cas de lacunes dans la couche de compression, il est possible d'appliquer un matériau de couche de compression supplémentaire à pleine extension.

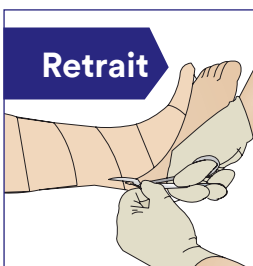

Les produits de compressothérapie du Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} peuvent être retirés avec des ciseaux de bandage ou en les déroulant.

Pour les patients moins tolérants à la compression, envisager l'utilisation du Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}.

Pour en savoir plus sur les Systèmes de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC}, veuillez consulter le site Web **3M.ca/Coban2Layer-fr**, communiquez avec le représentant de compte 3M de votre région, ou appelez le Centre d'assistance téléphonique de Soins de santé 3M en composant le 1 800 364-3577.

Renseignements pour commander

Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} pour les patients présentant un IPCB $\geq 0,8$



N° de référence	2094N
Rouleau 1 Couche de confort	10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg)
Rouleau 2 Couche de compression	10 cm x 3,5 m (4 po x 5,1 vg) <i>non étiré</i>
Rouleaux/boîte	2 rouleaux, 1 unité de chaque couche
Boîtes/caisse	8



N° de référence	2094XL
Rouleau 1 Couche de confort	10 cm x 3,5 m (4 po x 3,8 vg) <i>non étiré</i>
Rouleau 2 Couche de compression	10 cm x 4,5 m (4 po x 4,9 vg) <i>non étiré</i>
Rouleaux/boîte	2 rouleaux, 1 unité de chaque couche
Boîtes/caisse	8



N° de référence	20096
Rouleau 1 Couche de confort	15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 vg)
Rouleau 2 Couche de compression	10 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 vg) <i>non étiré</i>
Degré de compression	Élevé, 35 à 40 mm de Hg
Rouleaux/boîte	2 rouleaux, 1 unité de chaque couche
Boîtes/caisse	8

Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC} pour les patients présentant un IPCB $\geq 0,5$



N° de référence	2794N
Rouleau 1 Couche de confort	10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg)
Rouleau 2 Couche de compression	10 cm x 2,7 m (4 po x 2,5 vg) <i>non étiré</i>
Degré de compression	Modéré, 30 à 35 mm de Hg
Rouleaux/boîte	2 rouleaux, 1 unité de chaque couche
Boîtes/caisse	8



Produits offerts au Canada par :

La Compagnie 3M Canada
Division des
solutions médicales
 300, rue Tartan
 London (Ontario) N5V 4M9
 Canada
 1 800 364-3577
 3M.ca/Médicales

La Compagnie 3M
 2510 Conway Avenue
 St. Paul, MN 55144
 É.-U.
 1 800 364-3577

© 2023, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques de commerce et/ou des marques déposées, utilisées sous licence au Canada. Toute utilisation non autorisée interdite.
 2302-25666-F
 CA_FR_70-2013-1527-5