


Curativo V.A.C Veraflo Cleanse Choice

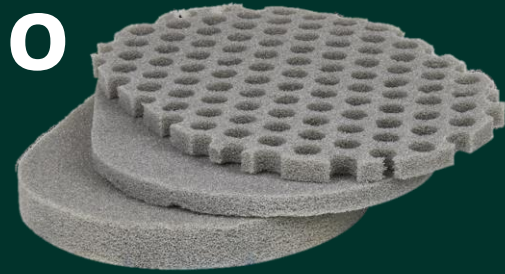

Descrição

A terapia Veraflo™ consiste na terapia por pressão negativa para feridas (terapia V.A.C.®) juntamente com a administração e drenagem controladas de soluções tópicas sobre o leito da ferida (terapia de instilação). Possui uma função de retenção programável que permite que a solução permaneça na ferida, promovendo a limpeza e a formação de tecido de granulação. O Curativo Veraflo Cleanse Choice é indicado para o tratamento de feridas com exsudato fibrinoso denso, descamação ou material infeccioso. O design exclusivo de três camadas do curativo facilita a remoção de materiais infecciosos, como exsudato fibrinoso espesso, esfacelo ou outra carga biológica da ferida, para oferecer uma opção de limpeza eficaz quando o desbridamento cirúrgico deve ser adiado ou não é possível ou apropriado. Os componentes necessários para o uso da Terapia Veraflo™ são: o curativo Veraflo Cleanse Choice, o cassete de instilação V.A.C. Veralink™, a unidade de terapia V.A.C. Ultra e o reservatório.

O Kit de curativo Veraflo Cleanse Choice é composto por:

- Curativo de Espuma
- Sensor VeraT.R.A.C.™
- Película Adesiva V.A.C.® Advanced
- 3M™ Cavilon™ Película Protetora sem ardor
- Régua descartável

Espuma: Espuma de poliuretano de éster reticulado, de cor cinza, com porosidade de 133 a 600 microns e menor grau de hidrofobicidade. Conjunto de espuma pré-cortada em três camadas: 1 camada de contato com um padrão de orifícios cortados simetricamente através da espuma para gerar um tecido de granulação melhor e maior e 2 camadas de cobertura de diferentes espessuras para oferecer opções de aplicação para feridas com diferentes profundidades. Transparente.

Película Adesiva V.A.C.® Advanced: Poliuretano transparente com adesivo acrílico, contém uma régua de medição transparente removível nas extremidades mais curtas, com indicador numérico para facilitar a aplicação. Tamanho 21 x 25,7 cm

3M™ Cavilon™ Película Protetora sem ardor: Protetor de pele hipoalergênico, sem álcool, indicado para reduzir o risco de lesões causadas por umidade (MASD) e/ou adesivos de cuidados com a saúde (MARSI).

Régua descartável: régua com etiquetas adesivas para registrar a data de aplicação do curativo, o número de peças aplicadas e o tamanho da ferida.

Conjunto de tubos VeraT.R.A.C.™: este é um sistema integrado que incorpora uma conexão para a entrada da solução a ser instilada e outra para a remoção de exsudato/líquido. É um sistema multilúmen com conector e sensores que permitem a remoção eficaz do exsudato da ferida ou úlcera por meio de um tubo de silicone flexível (cilíndrico). Possui sistema de travamento tipo clamp e conexão Luer-Lock, além de um disco de silicone com diâmetro total de 10 cm com filme transparente e adesivo. Possui um orifício central que deve estar totalmente conectado à espuma para o processo de sucção. Esse sistema é equipado com tecnologia de 4 lúmens periféricos para controlar e ajustar a pressão no local da ferida, garantindo o nível de pressão selecionado. Ela ajuda a reduzir os bloqueios de conexão e indica alarmes. Possui a tecnologia Easyclear Purge™ integrada que ajuda a limpar o exsudato no lúmen interno, detecta bloqueios e ativa uma explosão de ar positivo através dos lúmens externos aproximadamente a cada 5 minutos para ajudar a reduzir os bloqueios.

Indicações de uso

A Terapia Veraflo é indicada para pacientes com feridas crônicas, agudas, traumáticas, subagudas e deiscências, queimaduras de espessura parcial, úlceras (como as diabéticas, de pressão ou de insuficiência venosa), retalhos e enxertos.

Troca recomendada: 48 a 72 horas.

Descartável, uso único.

A Terapia Veraflo é contraindicada para:

- Pacientes com malignidade na ferida
- Osteomielite não tratada
- Fístulas não entéricas ou não exploradas
- Tecido necrótico com escara presente

Contraindicações específicas para a Terapia Veraflo:

Não use os curativos Veraflo com Octenisept™ (Schülke & Mayr GmbH), peróxido de hidrogênio ou soluções à base de álcool ou que contenham álcool.

Método de esterilização:

Radiação Gama.

Fabricante legal:

KCI USA, Inc.

Importado e distribuído por:

KCI Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. 10.918.419/0001-80

Informação adicional:

Não contém látex

Precauções

- Antes de usar o sistema de Terapia V.A.C Veraflo, consulte as instruções detalhadas do produto.
- O curativo Veraflo™ não substitui o tratamento sistêmico ou outro tratamento indicado para o controle de infecções.
- Não coloque os curativos do Sistema de Terapia V.A.C.® (incluindo os curativos Veraflo™) diretamente em contato com vasos sanguíneos expostos, locais de anastomose, órgãos ou nervos.
- Não utilize a Terapia Veraflo a menos que a ferida tenha sido completamente explorada, devido à possibilidade de instilação inadvertida de soluções tópicas para feridas em cavidades corporais adjacentes.
- Não distribua fluidos no tórax ou na cavidade abdominal devido ao risco potencial de alteração da temperatura corporal central e ao potencial de retenção de fluidos na cavidade torácica.

Vida útil:

2 anos a partir da data de fabricação.

País de origem:


México

Registro ANVISA:

80624960018

Catálogo	Tamanho	Tamanho do Curativo	Conteúdo
ULTVCC05MD	Médio	Camada de contato 18 cm × 12,5 cm × 0,8 cm Camada de cobertura espessa 18 cm × 12,5 cm × 1,6 cm Camada de cobertura fina 18 cm × 12,5 cm × 0,8 cm	1 Espuma perfurada (Camada de contato) 1 Espuma grossa (Camada de cobertura espessa) 1 Espuma delgada (Camada de cobertura fina) 1 Sensor 3M™ VeraT.R.A.C.™ 4 Laminas Adesivas 3M™V.A.C.® Advanced 4 3M™ Cavilon™ Película Protetora Sem Ardor 1 Régua Descartável
ULTVCC05LG	Grande	Camada de contato 25,6 cm × 15 cm × 0,8 cm Camada de cobertura espessa 25,6 cm × 15 cm × 1,6 cm Camada de cobertura fina 25,6 cm × 15 cm × 0,8 cm	1 Espuma perfurada (Camada de contato) 1 Espuma grossa (Camada de cobertura espessa) 1 Espuma delgada (Camada de cobertura fina) 1 Sensor 3M™ VeraT.R.A.C.™ 6 Laminas Adesivas 3M™V.A.C.® Advanced 5 3M™ Cavilon™ Película Protetora Sem Ardor 1 Régua Descartável

Curativo V.A.C Veraflo Cleanse Choice

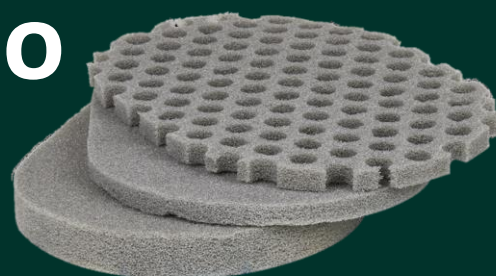

Código do produto		
	ULTVCC05MD	ULTVCC05LG
Produto	Curativo V.A.C. Veraflo	Curativo V.A.C. Veraflo
Tamanho	Médio	Grande
Material	Éster de poliuretano	Éster de poliuretano
Cor da espuma	Cinza	Cinza
Tamanho de poro	133 a 600 micras	133 a 600 micras
Forma	Ovalado	Ovalado
Dimensão	Camada de contato 18 cm × 12,5 cm × 0,8 cm Camada de cobertura espessa 18 cm × 12,5 cm × 1,6 cm Camada de cobertura fina 18 cm × 12,5 cm × 0,8 cm	Camada de contato 25,6 cm × 15 cm × 0,8 cm Camada de cobertura espessa 25,6 cm × 15 cm × 1,6 cm Camada de cobertura fina 25,6 cm × 15 cm × 0,8 cm
Conteúdo	1 Espuma perfurada (Camada de contato) 1 Espuma grossa (Camada de cobertura espessa) 1 Espuma delgada (Camada de cobertura fina) 1 Sensor 3M™ VeraT.R.A.C.™ 4 Laminas Adesivas 3M™ V.A.C.® Advanced 4 3M™ Cavilon™ Película Protetora Sem Ardor 1 Régua Descartável	1 Espuma perfurada (Camada de contato) 1 Espuma grossa (Camada de cobertura espessa) 1 Espuma delgada (Camada de cobertura fina) 1 Sensor 3M™ VeraT.R.A.C.™ 6 Laminas Adesivas 3M™ V.A.C.® Advanced 4 3M™ Cavilon™ Película Protetora Sem Ardor 1 Régua Descartável
Frequência de troca	48-72 horas	48-72 horas
Método de esterilização	ESTÉRIL – Radiação Gama	ESTÉRIL – Radiação Gama
Validade	2 anos	2 anos
Fabricante legal	KCI USA, Inc	KCI USA, Inc
País de origem	México	México
Informação adicional	Não contém látex	Não contém látex
Equipamento compatível	V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA
Registro ANVISA	80624960018	80624960018