

Curativo V.A.C Veraflo™



Descrição

A terapia Veraflo™ consiste na terapia por pressão negativa para feridas (terapia V.A.C.®) juntamente com a administração e drenagem controladas de soluções tópicas sobre o leito da ferida (terapia de instilação). Ela tem uma função de retenção programável que permite que a solução permaneça na ferida, promovendo a limpeza e a formação de tecido de granulação.

Os componentes necessários para o uso da Terapia Veraflo™ são: o curativo Veraflo™, o cassete de instilação Veralink™, a unidade de terapia V.A.C. Ultra e o reservatório.

O curativo Veraflo™ é composto de:

- Curativo de Espuma
- Sensor VeraT.R.A.C.™
- Película Adesiva V.A.C.® Advanced
- 3M™ Cavilon™ Película Protetora sem ardor
- Régua descartável

Curativo: espuma de éster de poliuretano reticulado com poros abertos de 400 a 600 microns e menor grau de hidrofobicidade. Na forma de um bloco oval ou espiral pré-cortado em duas folhas finas, pode ser cortado para se ajustar ao formato e ao tamanho da ferida.

Película Adesiva V.A.C.® Advanced: Poliuretano transparente com adesivo acrílico, contém uma régua de medição transparente removível nas extremidades mais curtas, com indicador numérico para facilitar a aplicação. Tamanho 21 x 25,7 cm

3M™ Cavilon™ Película Protetora sem ardor: Protetor de pele hipoalergênico, sem álcool, indicado para reduzir o risco de lesões causadas por umidade (MASD) e/ou adesivos de cuidados com a saúde (MARSI).

Régua descartável: régua com etiquetas adesivas para registrar a data de aplicação do curativo, o número de peças aplicadas e o tamanho da ferida.

Conjunto de tubos VeraT.R.A.C.™: este é um sistema integrado que incorpora uma conexão para a entrada da solução a ser instilada e outra para a remoção de exsudato/líquido. É um sistema multilúmen com conector e sensores que permitem a remoção eficaz do exsudato da ferida ou úlcera por meio de um tubo de silicone flexível (cilíndrico). Possui sistema de travamento tipo clamp e conexão Luer-Lock, além de um disco de silicone com diâmetro total de 10 cm com filme transparente e adesivo. Possui um orifício central que deve estar totalmente conectado à espuma para o processo de sucção. Esse sistema é equipado com tecnologia de 4 lúmens periféricos para controlar e ajustar a pressão no local da ferida, garantindo o nível de pressão selecionado. Ela ajuda a reduzir os bloqueios de conexão e indica alarmes. Possui a tecnologia Easyclear Purge™ integrada que ajuda a limpar o exsudato no lúmen interno, detecta bloqueios e ativa uma explosão de ar positivo através dos lúmens externos aproximadamente a cada 5 minutos para ajudar a reduzir os bloqueios.

Indicações de uso

A Terapia Veraflo é indicada para pacientes com feridas crônicas, agudas, traumáticas, subagudas e deiscentes, queimaduras de espessura parcial, úlceras (como as diabéticas, de pressão ou de insuficiência venosa), retalhos e enxertos.

Troca recomendada: 48 a 72 horas.

Descartável, uso único.

A Terapia Veraflo é contraindicada para:

- Pacientes com malignidade na ferida
- Osteomielite não tratada
- Fístulas não entéricas ou não exploradas
- Tecido necrótico com escara presente

Contraindicações específicas para a Terapia Veraflo:

Não use os curativos Veraflo com Octenisept™ (Schülke & Mayr GmbH), peróxido de hidrogênio ou soluções à base de álcool ou que contenham álcool.

Método de esterilização:

Radiação Gama.

Fabricante legal:

KCI USA, Inc.

Importado e distribuído por:

KCI Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. 10.918.419/0001-80

Informação adicional:

Não contém látex

Precauções

- Antes de usar o sistema de Terapia V.A.C Veraflo, consulte as instruções detalhadas do produto.
- O curativo Veraflo™ não substitui o tratamento sistêmico ou outro tratamento indicado para o controle de infecções.
- Não coloque os curativos de espuma do sistema de terapia V.A.C.® (incluindo os curativos do Veraflo™) diretamente em contato com vasos sanguíneos expostos, locais de anastomose, órgãos ou nervos.
- Não utilize a Terapia Veraflo a menos que a ferida tenha sido completamente explorada, devido à possibilidade de instilação inadvertida de soluções tópicas para feridas em cavidades corporais adjacentes.
- Não distribua fluidos no tórax ou na cavidade abdominal devido ao risco potencial de alteração da temperatura corporal central e ao potencial de retenção de fluidos na cavidade torácica.

Vida útil:

2 anos a partir da data de fabricação.

País de origem:

México

Registro ANVISA:

80624960018

Catálogo	Tamanho	Tamanho do Curativo	Conteúdo
ULTVFL05SM	Pequeno	(11,2 x 7,7 x 1,8cm)	2 espumas cortadas em espiral 1 Sensor VeraT.R.A.C.™ 2 Películas Adesivas V.A.C.® Advanced 1 3M™ Cavilon™ película protetora sem ardor 1 régua descartável
ULTVFL05MD	Médio	(17,4 x 14,7 x 1,8cm)	2 espumas cortadas em espiral 1 Sensor VeraT.R.A.C.™ 3 Películas Adesivas V.A.C.® Advanced 2 3M™ Cavilon™ película protetora sem ardor 1 régua descartável
ULTVFL05LG	Grande	(25,6 x 15 x 1,6cm)	2 espumas cortadas em espiral 1 Sensor VeraT.R.A.C.™ 5 Películas Adesivas V.A.C.® Advanced 4 3M™ Cavilon™ película protetora sem ardor 1 régua descartável

Fale com a Solventum

0800-7620042

www.Solventum.com

Falecom.br@solventum.com

KCI é uma empresa do grupo Solventum. 3M Healthcare e KCI agora são Solventum.

© Solventum 2024. Solventum e Sistema de Terapia V.A.C.®, são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logotipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M.

Curativo V.A.C. Veraflo™



Código do produto	 ULTVFL05SM	 ULTVFL05MD	 ULTVFL05LG
Produto	Curativo V.A.C. Veraflo	Curativo V.A.C. Veraflo	Curativo V.A.C. Veraflo
Tamanho	Pequeno	Médio	Grande
Material	Éster de poliuretano	Éster de poliuretano	Éster de poliuretano
Cor da espuma	Preto	Preto	Preto
Tamanho do poro	400 a 600 micras	400 a 600 micras	400 a 600 micras
Formato	Espiral	Espiral	Espiral
Dimensão	11,2 x 7,7 x 1,8cm	17,4 x 14,7 x 1,8cm	25,6 x 15 x 1,6cm
Conteúdo	2 espumas cortadas em espiral 1 Sensor VeraT.R.A.C.™ 2 Películas Adesivas V.A.C.® Advanced 1 3M™ Cavilon™ película protetora sem ardor 1 régua descartável	2 espumas cortadas em espiral 1 Sensor VeraT.R.A.C.™ 3 Películas Adesivas V.A.C.® Advanced 2 3M™ Cavilon™ película protetora sem ardor 1 régua descartável	2 espumas cortadas em espiral 1 Sensor VeraT.R.A.C.™ 5 Películas Adesivas V.A.C.® Advanced 4 3M™ Cavilon™ película protetora sem ardor 1 régua descartável
Frequência de troca	48-72 horas	48-72 horas	48-72 horas
Método de esterilização	ESTÉRIL - Radiação gama	ESTÉRIL - Radiação gama	ESTÉRIL - Radiação gama
Validade	2 anos	2 anos	2 anos
Fabricante legal	KCI USA, Inc	KCI USA, Inc	KCI USA, Inc
País de origem	México	México	México
Informação adicional	Não contém látex	Não contém látex	Não contém látex
Equipamento compatível	V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA
Registro ANVISA	80624960018	80624960018	80624960018