



# Clarity™

Esthetic Orthodontic Solutions

## Guía técnica

### Confección de Attachments



1. Aislar los dientes y probar la plantilla de attachments para asegurarse de su correcto asentamiento.

**Nota:** una sugerencia es probar el primer alineador en este momento. Enjuagar y secar según sea necesario.




2. Hacer profilaxis con piedra pómez o pasta libre de agentes oleosos, enjuagar y secar.



3. Proceder a realizar el grabado ácido y posteriormente aplicar una capa delgada y uniforme de **3M™ Transbond™ XT Primer** sobre los dientes donde habrá attachments.




4. **Nota:** como alternativa a la adhesión con ácido y la aplicación del **3M™ Transbond™ XT Primer**, puedes utilizar **3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer** (REF 712-090) para realizar el proceso de grabado e imprimado en un solo paso.

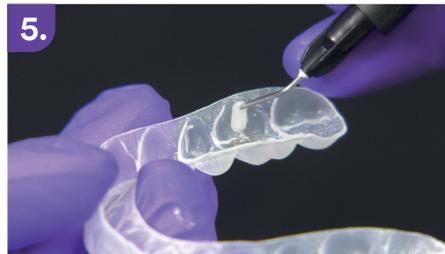

5. Utilizando el adhesivo de baja viscosidad **3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive** (REF 712-046), llene las cavidades en el molde de los attachments.

- ⌚ Evite el exceso de producto para facilitar la limpieza.
- ⌚ Evite el llenado insuficiente para reducir huecos y posibles fallas.

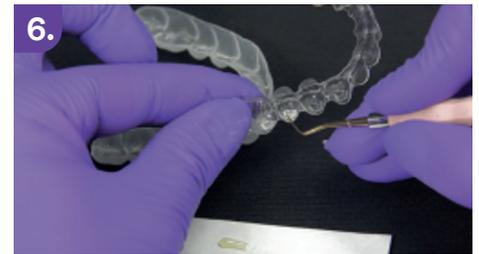

6. **Nota:** como alternativa, aplique el adhesivo **3M™ Transbond™ XT Light Cure Adhesive** (REF 712-035) en las cavidades en el molde de los attachments.

- ⌚ Evite el exceso de producto para facilitar la limpieza.
- ⌚ Evite el llenado insuficiente para reducir huecos y posibles fallas.



7. Coloque la plantilla de attachments asegurando su correcto asentamiento y aplique una ligera presión al momento del fotocurado.



8. Fotocure directamente sobre el attachment por 9 segundos con **3M™ Ortholux™ Luminous Curing Light**.



9. Retire la plantilla de la boca y elimine cualquier residuo con un instrumento manual o rotatorio.