

Prevena™

Sistema de Controle de Incisões

Curativo Peel & Place 20 cm



Descrição

O sistema de controle de incisões Prevena™ é indicado para tratar o ambiente de incisões cirúrgicas que continuam a drenar após o fechamento com suturas ou grampos. O sistema mantém um ambiente fechado e permite a remoção adequada do exsudato, com a aplicação de terapia de pressão negativa. O curativo possui o sistema SensaT.R.A.C.™ integrado permitindo a compatibilidade com a linha de equipamentos V.A.C.

Ele consiste em:

Um curativo Prevena™ Peel & Place™ e uma fonte de pressão negativa, que pode ser uma das seguintes unidades de terapia:

- Unidade de terapia Prevena™ 125
- Unidade de terapia Prevena™ Plus 125
- Unidade de terapia ACTIV.A.C.™
- Unidade de terapia V.A.C.ULTA™

O Kit do Sistema de Tratamento de Incisões Prevena™ inclui os seguintes componentes:

- Curativo Prevena™ Peel & Place™ de 20 cm: um curativo especialmente projetado para aplicação no local da incisão cirúrgica.
- Tiras de vedação Prevena™: usadas para criar uma vedação adesiva contínua ao redor do curativo.
- Régua: a etiqueta removível pode ser usada conforme necessário para registrar a data de aplicação ou remoção do curativo.
- Reservatório Prevena™ de 45 ml: reservatório estéril para coleta de fluidos da ferida.
- Unidade de terapia Prevena™ 125: fornece pressão negativa ao local da incisão cirúrgica.
- A unidade é operada por bateria. O estojo de transporte não estéril da Terapia Prevena™ 125 está incluído para facilitar a mobilidade do paciente. .

Curativo Prevena™ Peel & Place™. O sistema de tratamento de incisões Prevena™ inclui um curativo Prevena™ Peel & Place™. Esse curativo inclui uma superfície de contato com a pele com 0,019% de prata iônica. A prata na superfície de contato do curativo Prevena™ não se destina a tratar a infecção, mas a reduzir o crescimento bacteriano no tecido. Os curativos patenteados Prevena™ utilizam a tecnologia de curativo de espuma reticulada de célula aberta (ROCF) especificamente projetada para fornecer terapia de pressão negativa a feridas para ajudar a tratar incisões fechadas.



— **Capa protetora flexível** - permite que o curativo se adapte e funcione como uma barreira contra a contaminação externa

— **Espuma reticulada de célula aberta:** distribui uniformemente -125 mmHg de pressão negativa contínua

— **Camada de interface com a pele com 0,019% de prata iônica:** não agride a pele

— **Camada de estabilização:** evita que o filme se enrugue durante a aplicação, criando uma vedação resistente

— **Película adesiva:** fixa o curativo no local da cirurgia

Indicações de uso

Para obter o máximo benefício, o Sistema de Controle de Incisões Prevena™ deve ser aplicado imediatamente após a cirurgia em incisões limpas e cirurgicamente fechadas. A aplicação contínua é necessária por um **mínimo de dois dias e um máximo de sete dias**. O paciente pode continuar o tratamento em casa. A unidade de terapia Prevena™ 125 será desligada automaticamente após 192 horas (oito dias) de operação contínua.

A terapia Prevena™ é contraindicada para:
Pacientes com sensibilidade à prata.

Método de esterilização:

Radiação gama.

Fabricante legal:

KCI USA, Inc.

Informação adicional:

Ao final do tratamento, o paciente deve devolver a unidade de terapia Prevena ao médico ou à instituição para descarte. Descarte todos os resíduos de acordo com os regulamentos da instituição.

Precauções

- Como acontece com qualquer produto médico com prescrição, você deve ler cuidadosamente as informações de segurança e seguir as instruções para o uso adequado.
- Descartável, de uso único.
- O Sistema de Controle de Incisões Prevena™ não se destina a tratar feridas abertas ou feridas com deiscência.
- Evite aplicar o curativo Prevena™ circunferencialmente.

Vida útil:

3 anos a partir da data de fabricação.

País de origem:

Irlanda

Registro ANVISA:

Sistema de Controle de Incisões Prevena™- 80624960010
Reservatório 45ML Prevena – 80624960012
Curativo Prevena Peel & Place - 80624960011

Código	Tipo	Conteúdo	Apresentação
PRE1001	KIT	Sistema de Controle de Incisões Prevena™ : 1 Curativo Peel & Place 20 cm 1 Unidade de Terapia Prevena 125 1 Reservatório de 45ml 1 Conjunto de Tiras de vedação 1 Estojo de transporte 1 Guia para o cirurgião	Caixa com 1 kit
PRE1055	Curativo	Curativo Peel & Place 20 cm: 1 Curativo 1 Conjunto de Tiras de vedação 1 Régua	Unidade
PRE1095	Reservatório	1 Reservatório de 45ml para a Unidade de Terapia Prevena 125	Unidade

