


Tampon Gel CHG

(gluconate de chlorhexidine)

3M™ Tegaderm™ 1664R

Conçu pour offrir polyvalence et protection antimicrobienne, le Tampon Gel CHG présente un design facile à utiliser pour protéger les sites d'insertion de divers dispositifs percutanés.

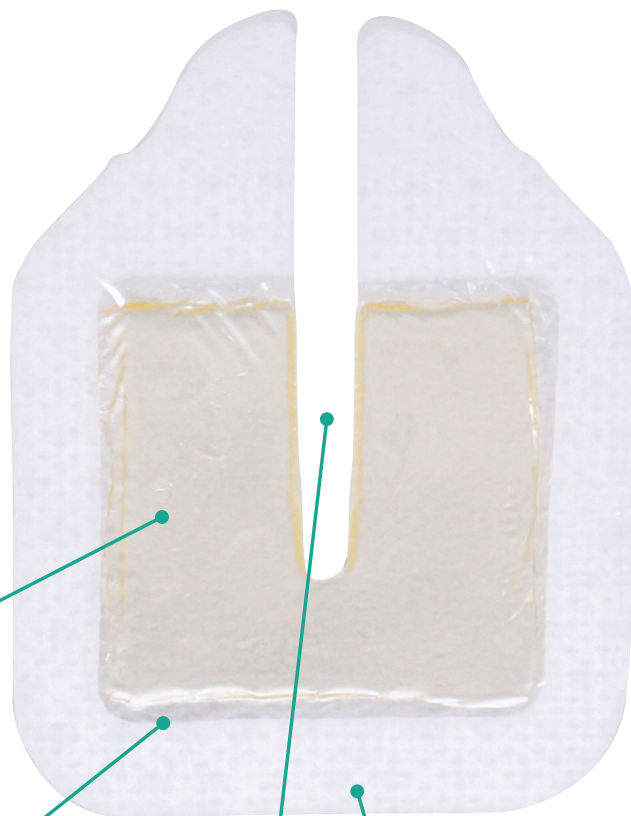

Le Tampon Gel CHG transparent

Offre une protection antimicrobienne et une visibilité du site. Aucune humidité adjacente n'est nécessaire pour l'activer. Absorbe les fluides*.

Film hautement respirant

Aide à libérer l'humidité.

Fente pré-découpée

S'adapte à une variété de dispositifs percutanés.

Bordure adhésive

Respectueux de la peau et solide maintien

L'image a été agrandie pour montrer les détails. Voir dimensions page suivante

Protection antimicrobienne

Activation immédiate. Il est prouvé qu'il réduit la flore cutanée et supprime sa recolonisation pendant plus de 7 jours.¹ Efficace contre une variété de bactéries gram-positives, gram-négatives, de levures et de champignons.² Peut absorber le sang et les fluides sans compromettre la protection antimicrobienne.

Polyvalence

S'adapte à une grande variété de dispositifs percutanés (jusqu'à 40 FR) et reste en contact avec la peau autour du site d'insertion.

Visibilité du site

Sa transparence permet une surveillance continue du site d'insertion pour une identification précoce des complications.

*Les bancs d'essai montrent que le Tampon Gel CHG peut absorber 8 fois son poids en solution saline et 3 fois son poids en sang.

1 Temps de destruction *in vivo* de la flore cutanée normale, EM-05-136567, EM-05-000803.

2 Tests *in vitro* de l'efficacité antimicrobienne, EM-05-666609, EM-05-666611, Aucune corrélation clinique n'est prévue avec les tests *in vitro*.


1664R

Guide produit

Dispositifs d'accès vasculaire


Le Tampon Gel 3M™ Tegaderm™ CHG (gluconate de chlorhexidine) peut être utilisé pour diverses applications de dispositifs percutanés. Suivez les instructions ci-dessous pour la pose et le retrait :

Préparer

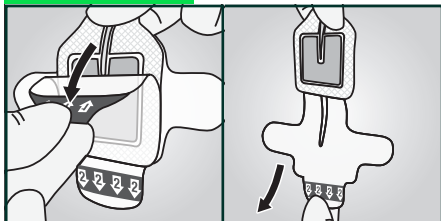


Préparez le site selon le protocole de votre établissement. Assurez-vous que le site soit complètement sec, respectez le séchage spontané. Retirez le liner de protection 1, puis le liner de protection 2 comme indiqué ci-dessus.

Positionner

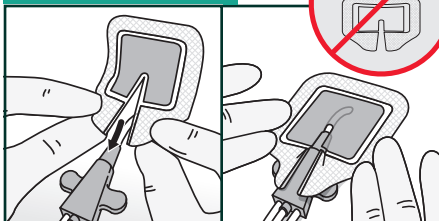


Placez le Tampon Gel CHG autour du dispositif, en couvrant le site d'insertion et en vous assurant que le dispositif repose sur la fente du Tampon Gel. Selon le protocole de votre établissement, le Tampon Gel CHG peut être utilisé en combinaison avec un pansement transparent et semi-perméable (par exemple : 3M™ Tegaderm™ HP, 3M™ Tegaderm™ I.V. Port, 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced).

Sécuriser

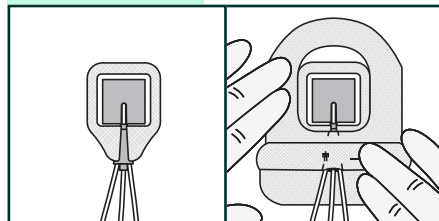

Selon le protocole de votre établissement, fixez le cathéter avec le pansement approprié, transparent et semi-perméable (par exemple : 3M™ Tegaderm™ HP, 3M™ Tegaderm™ I.V. Port, 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced).

Surveiller

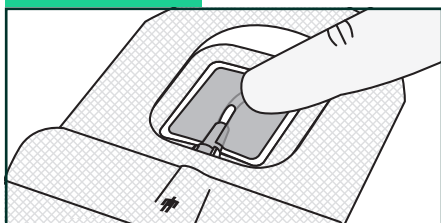


Inspectez le Tampon Gel CHG quotidiennement et changez-le si nécessaire, conformément au protocole de votre établissement.

Changez le pansement :

- Au moins tous les 7 jours, ou selon le protocole de votre établissement
- Si le Tampon Gel CHG reste « déformé » lorsque l'on appuie dessus avec un doigt ganté
- Si le Tampon Gel CHG est saturé, lorsque le pansement est souillé ou se décolle, ou en cas de gonflement, de drainage visible ou de perte de visibilité
- En cas de saignement actif ou de présence de sang à l'extérieur du Tampon Gel CHG


Le Tampon Gel CHG n'est pas destiné à absorber de grandes quantités de sang ou de drainage. Couvrez et protégez le Tampon Gel CHG pendant le bain ou la douche du patient.

Retrait

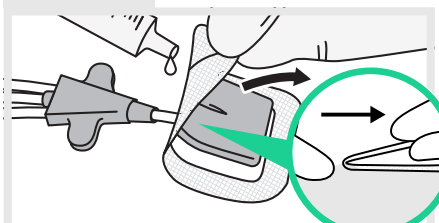

Lorsque le Tampon Gel CHG est exposé, saisissez une partie du Tampon Gel et du pansement entre le pouce et l'index. Appliquez quelques gouttes de solution saline ou d'alcool si nécessaire pour faciliter le retrait du Tampon Gel. Le Tampon Gel CHG peut rester attaché au pansement transparent lors du retrait. Il peut être alors nécessaire d'étirer le film (« technique du retrait par étirement ») pour aider à détacher le pansement du Tampon Gel CHG.

Autres applications

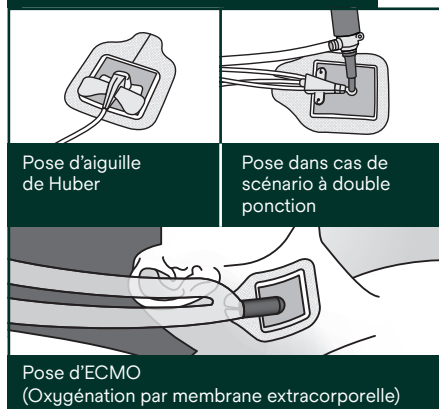

Remarque : Sécuriser le maintien avec le pansement approprié, selon le protocole de votre établissement.

Avertissements et précautions :

- Ne pas utiliser le Tampon Gel CHG sur les nourrissons prématurés ou les nourrissons de moins de 2 mois.
- L'utilisation de ce produit sur les nourrissons prématurés peut provoquer des réactions d'hypersensibilité ou une nécrose de la peau.
- La sécurité et l'efficacité du Tampon Gel CHG n'ont pas été évaluées chez les enfants de moins de 18 ans.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Référence produit

Visuel produit	Référence	Code Commande	Dimensions	Pansements/boîte	Boîtes/Carion
	1664R	TE1664R	Pansement : 6.2 cm x 4.9 cm Tampon Gel : 3 cm x 3 cm	25	4

3M Health Care France
(Solventum France)

1, Parvis de l'Innovation
95006 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél. 01 85 26 03 00
www.3Mfrance.fr/medical

Med-Surg-273_Novembre 2024. © 2024, Solventum. Tous droits réservés. Solventum et le logo S sont des marques déposées de Solventum. 3M, le logo 3M et Tegaderm sont des marques déposées. Photos non contractuelles. Le Tampon Gel 3M™ Tegaderm™ CHG 1664R est un dispositif médical (DM) de classe III, marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M Health Care France (Solventum France), 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. OMG1082080.

solventum