

3M™ Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive



- Indicado para la adhesión de bandas ortodónticas.
- Óptimo sellado marginal.
- Reducción de desperdicio.
- Alta fuerza adhesiva.
- Coloración azul para facilitar la remoción de excesos al instalar las bandas y la remoción de residuos al retirarlas.



1 Retire los separadores elásticos



2 Profilaxis



3 Lavado



4 Seleccione la banda y pruébela en boca



5 Aíse los dientes y mantenga el campo seco



6 Seque la banda



7 Aplique el material en el interior



8 Coloque la banda en su sitio y retire el exceso





9 Fotopolimerice



3M Cuidado Oral

3M y "Ciencia. Aplicada a la vida" son marcas registradas de 3M.
Por favor, recicle. Todos los derechos reservados. © 3M 2024.

Síguenos

  @3MCuidadoOralLatinoamerica