


3M™ Transbond™ PLUS Color Change Adhesive + 3M™ Transbond™ XT Primer



- Indicado para adhesión de brackets cerámicos y metálicos.
- Color rosa para facilitar la limpieza de excedentes; cambia de color tras la fotopolimerización.
- Hidrofílico.
- Liberación de flúor.

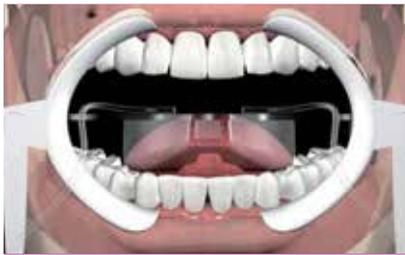

1 Aíse los dientes



2 Profilaxis



3 Lavado Secado



4 Grabado ácido por 15 segundos



5 Lavado



6 Secado



7 3M™ Transbond™ XT Primer



8 3M™ Transbond™ XT Primer



9 Aplique una capa fina en el diente



10



11 Aplique adhesivo* a la base del bracket



12 Posicione el bracket y remueva el exceso de adhesivo



13 Fotopolimerice

Presentación de producto

Disponible en jeringas y cápsulas. Sujeto a disponibilidad según país.



3M Cuidado Oral

3M y "Ciencia. Aplicada a la vida" son marcas registradas de 3M. Por favor, recicle. Todos los derechos reservados. © 3M 2024.

Síguenos

@3MCuidadoOralLatinoamerica