

3M™ Transbond™ XT



- Adhesivo confiable, rápido y preciso.
- Indicado para brackets cerámicos y metálicos.
- Tiempo de trabajo adecuado para un posicionamiento preciso.
- Adhesión instantánea tras la fotopolimerización, permitiendo la colocación de los arcos inmediatamente después de la adhesión.
- Consistencia adecuada para una fácil remoción de excesos.



1 Profilaxis



2 Lavado abundante



3 Secado



4 Grabado ácido por 15 segundos



5 Remoción de ácido y lavado



6 Secado



7 Humedezca la punta del aplicador en 3M™ Transbond™ XT Primer



8 Aplique una capa fina en el diente



9 Aplique el adhesivo en la base del bracket



10 Posicione el bracket y remueva el exceso de adhesivo



11 Fotopolimerice



3M Cuidado Oral

3M y "Ciencia. Aplicada a la vida" son marcas registradas de 3M.
Por favor, recicle. Todos los derechos reservados. © 3M 2024.

Síguenos

  @3MCuidadoOralLatinoamerica