

Curativo V.A.C.® Granufoam Silver™

com Tecnologia SensaT.R.A.C.™



Descrição

Os Curativos V.A.C.® Granufoam Silver™ fazem parte do Sistema de Terapia V.A.C.®, que é um sistema avançado de tratamento de feridas que cria um ambiente que promove a cicatrização da ferida aplicando pressão negativa (vácuo) por meio de um curativo e uma unidade de terapia patenteada com reservatório. O Sistema integrado de Terapia V.A.C.® prepara o leito da ferida para o fechamento, reduzindo o edema, promovendo a formação e a perfusão do tecido de granulação e removendo o exsudato e o material infeccioso. Os curativos V.A.C.® Granufoam Silver™ combinam os benefícios comprovados da Terapia V.A.C.® com os benefícios antimicrobianos da prata, que pode ajudar a reduzir infecções em ferida. Ele não substitui o tratamento com antibióticos sistêmicos.

O kit de curativos V.A.C.® Granufoam Silver™ é composto por:

- Curativo de Espuma
- Sensor 3M™ SensaT.R.A.C.™
- Película Adesiva V.A.C.®
- Régua descartável

Curativo de Espuma: É uma espuma hidrofóbica cinza de éter de poliuretano reticulada com poro aberto de 400 a 600 microns, com prata metálica e elemental (10%) de liberação controlada. É o único curativo de espuma de prata projetado especificamente para o Sistema de Terapia V.A.C.. A prata metálica micro aglomerada é distribuída uniformemente por toda a espuma. Combina os benefícios da terapia V.A.C.® com a propriedade de barreira bacteriana eficaz da prata (bactericida-bacteriostática). Pode ser cortada para se ajustar ao formato e ao tamanho da ferida, garantindo o contato direto e completo da prata com a ferida. Radiotransparente.

Sensor SensaT.R.A.C.™: É um sistema multilúmen com conector e sensores que permitem a remoção eficaz do exsudato da ferida ou úlcera por meio de um tubo de silicone flexível (cilíndrico) de 90 cm de comprimento. Com sistema de bloqueio tipo clamp e conexão Luer-Lock, além de um disco de silicone com diâmetro total de 10 cm com filme transparente e adesivo. Possui um orifício central que deve ser totalmente conectado à espuma V.A.C.® Granufoam Silver™ para o processo de aspiração. Esse sistema apresenta a tecnologia de 4 lúmens periféricos que permite controlar e ajustar a pressão no local da ferida, garantindo o nível de pressão selecionado. Ela ajuda a reduzir os bloqueios de conexão e indica alarmes. Possui a tecnologia Easyclear Purge™ incorporada que ajuda a limpar o exsudato no lúmen interno, detecta bloqueios e ativa uma explosão de ar positivo através dos lúmens externos aproximadamente a cada 5 minutos para ajudar a reduzir os bloqueios.

Película Adesiva V.A.C.®: Película de poliuretano transparente com adesivo acrílico, com indicador numérico para facilitar a aplicação. Proporciona uma barreira contra contaminantes externos.

Régua descartável: Régua para dimensionamento da ferida, inclui etiquetas adesivas para registrar a data de aplicação do curativo e o número de peças de curativo de espuma colocadas na ferida do paciente.

Indicações de uso

A terapia V.A.C.® é indicada para pacientes com feridas crônicas, agudas, traumáticas, subagudas e deiscências, queimaduras de espessura parcial, úlceras (como diabéticas, de pressão ou de insuficiência venosa), retalhos e enxertos.

Recomendada a troca a cada 48 - 72 horas.

A terapia V.A.C.® está **contraindicada** para:

- Pacientes com ferida maligna
- Osteomielite não tratada
- Fístulas não entéricas ou não exploradas
- Tecido necrótico com escara presente
- Sensibilidade à prata.

Método de esterilização:

Radiação Gama.

Fabricante legal:

KCI USA, Inc.

Informação adicional:

Não contém látex

Importado e distribuído por:

KCI Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. 10.918.419/0001-80

Código	Tamanho	Medida da Espuma	Conteúdo
M8275098	Pequeno	(10 x 7,5 x 3,2cm)	01 Espuma de poliuretano revestida com prata 01 Coletor SensaT.R.A.C.™ 01 Película Adesiva V.A.C.® 01 Régua V.A.C.®
M8275096	Médio	(18 x 12,5 x 3,2cm)	01 Espuma de poliuretano revestida com prata 01 Coletor SensaT.R.A.C.™ 02 Película Adesiva V.A.C.® 01 Régua V.A.C.®
M8275099	Grande	(26 x 15 x 3,2cm)	01 Espuma de poliuretano revestida com prata 01 Coletor SensaT.R.A.C.™ 02 Película Adesiva V.A.C.® 01 Régua V.A.C.®

Precauções

- Antes de utilizar o Sistema de Terapia V.A.C.®, consulte as instruções detalhadas do produto.
- O curativo V.A.C.® Granufoam Silver™ não substitui o tratamento sistêmico ou outro tratamento indicado para o controle de infecções.
- Não coloque curativos do Sistema de Terapia V.A.C.® diretamente sobre vasos sanguíneos expostos, locais de anastomose, órgãos ou nervos.
- Descartável, de utilização única.
- Para ajudar a garantir uma utilização segura e eficaz, os curativos V.A.C.® Granufoam™, V.A.C. Granufoam Silver™ e V.A.C.® Whitefoam™ devem ser utilizados apenas com unidades de terapia V.A.C.®.

Vida útil:

2 anos a partir da data de fabricação.

País de origem:

Irlanda

Registro ANVISA:

80624960017

Curativo V.A.C.® Granufoam Silver™

com Tecnologia SensaT.R.A.C™



Código do Produto			
	M8275098	M8275096	M8275099
Curativo	V.A.C.® Granufoam Silver™	V.A.C.® Granufoam Silver™	V.A.C.® Granufoam Silver™
Tamanho	Pequeno	Médio	Grande
Material	Poliuretano Éter (PU)	Poliuretano Éter (PU)	Poliuretano Éter (PU)
Porcentagem de íons de prata na espuma	0.019%	0.019%	0.019%
Cor do Curativo	Cinza	Cinza	Cinza
Tamanho do poro	400 a 600 micras	400 a 600 micras	400 a 600 micras
Forma	Ovalado	Ovalado	Ovalado
Dimensão	(10 x 7,5 x 3,2cm)	(18 x 12,5 x 3,2cm)	(26 x 15 x 3,2cm)
Conteúdo	1 Espuma 1 Sensor SensaT.R.A.C.™ 01 Película Adesiva V.A.C.® 01 Régua V.A.C.®	1 Espuma 1 Sensor SensaT.R.A.C.™ 02 Películas Adesivas V.A.C.® 01 Régua V.A.C.®	1 Espuma 1 Sensor SensaT.R.A.C.™ 01 Películas Adesivas V.A.C.® 01 Régua V.A.C.®
Frequência de troca	48-72 horas	48-72 horas	48-72 horas
Método de esterilização	ESTÉRIL - Radiação gama	Radiação gama	Radiação gama
Validade	2 anos	2 anos	2 anos
Fabricante legal	KCI USA, Inc	KCI USA, Inc	KCI USA, Inc
País de origem	Irlanda	Irlanda	Irlanda
Informação Adicional	Não contém látex	Não contém látex	Não contém látex
Equipamento compatível	3M V.A.C. ULTA, 3M ACTIVAC	3M V.A.C. ULTA, 3M ACTIVAC	3M V.A.C. ULTA, 3M ACTIVAC
Registro ANVISA	80624960017	80624960017	80624960017