

Curativos V.A.C.® Whitefoam™



Descrição

Os Curativos V.A.C.® Whitefoam™ fazem parte do Sistema de Terapia V.A.C.®, que é um sistema avançado de tratamento de feridas que cria um ambiente que promove a cicatrização da ferida aplicando pressão negativa (vácuo) por meio de um curativo e uma unidade de terapia patenteada com reservatório. O Sistema integrado de Terapia V.A.C.® prepara o leito da ferida para o fechamento, reduzindo o edema, promovendo a formação e a perfusão do tecido de granulação e removendo o exsudato e o material infeccioso.

O curativo V.A.C.® Whitefoam é um curativo pré-humedecido em água estéril com maior resistência à tração. Adere muito pouco às feridas e é útil em situações de hiper granulação. Permite a remoção fácil de túneis e descolamentos devido à sua maior resistência à tração em comparação com os curativos V.A.C.® Granufoam™.

O kit de curativos V.A.C.® Whitefoam está composto por:

- Curativo de espuma de álcool polivinílico
- Sensor 3M™ SensaT.R.A.C.™
- Película Adesiva V.A.C.®
- Régua descartável

Curativo de Espuma: É uma espuma branca de álcool polivinílico (PVA) estéril, sem ligações cruzadas, com poros de 60 a 270 microns, sendo mais densa do que o V.A.C.® Granufoam™. É hidrofílica e humedecida com água estéril. Requer uma pressão mais elevada de 125 mmHg a 175 mmHg para proporcionar uma distribuição adequada da terapia de pressão negativa. Pode ser cortado.

Sensor SensaT.R.A.C.™: É um sistema multilúmen com conector e sensores que permitem a remoção eficaz do exsudato da ferida ou úlcera por meio de um tubo de silicone flexível (cilíndrico) de 90 cm de comprimento. Com sistema de bloqueio tipo clamp e conexão Luer-Lock, além de um disco de silicone com diâmetro total de 10 cm com filme transparente e adesivo. Possui um orifício central que deve ser totalmente conectado à espuma V.A.C.® Granufoam™ para o processo de aspiração. Esse sistema apresenta a tecnologia de 4 lúmens periféricos que permite controlar e ajustar a pressão no local da ferida, garantindo o nível de pressão selecionado. Ela ajuda a reduzir os bloqueios de conexão e indica alarmes. Possui a tecnologia Easyclear Purge™ incorporada que ajuda a limpar o exsudato no lúmen interno, detecta bloqueios e ativa uma explosão de ar positivo através dos lúmens externos aproximadamente a cada 5 minutos para ajudar a reduzir os bloqueios.

Película Adesiva V.A.C.®: Película de poliuretano transparente com adesivo acrílico, com indicador numérico para facilitar a aplicação. Proporciona uma barreira contra contaminantes externos.

Régua descartável: Régua para dimensionamento da ferida, inclui etiquetas adesivas para registrar a data de aplicação do curativo e o número de peças de curativo de espuma colocadas na ferida do paciente.

Indicações de uso

A terapia V.A.C.® é indicada para pacientes com feridas crônicas, agudas, traumáticas, subagudas e deiscências, queimaduras de espessura parcial, úlceras (como diabéticas, de pressão ou de insuficiência venosa), retalhos e enxertos. O curativo V.A.C.® WhiteFoam pode ser mais apropriado para uso em túneis explorados.

Recomendada a troca a cada 48 - 72 horas.

A terapia V.A.C.® está **contraindicada** para:

- Pacientes com ferida maligna
- Osteomielite não tratada
- Fístulas não entéricas ou não exploradas
- Tecido necrótico com **escara presente**

Método de esterilização:

Radiação gama.

Fabricante legal:

KCI USA, Inc.

Informação adicional:

Não contém látex

Importado e distribuído por:
KCI Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos
para Saúde Ltda. 10.918.419/0001-80

Precauções

- Antes de utilizar o Sistema de Terapia V.A.C.®, consulte as instruções detalhadas do produto.
- Não coloque curativos de espuma Sistema de Terapia V.A.C.® diretamente sobre vasos sanguíneos expostos, locais de anastomose, órgãos ou nervos.
- Descartável, de utilização única.
- Para ajudar a garantir uma utilização segura e eficaz, os curativos V.A.C.® Granufoam™, V.A.C. Granufoam Silver™ e V.A.C.® Whitefoam™ devem ser utilizados apenas com unidades de terapia V.A.C.®.

Vida útil:

2 anos a partir da data de fabricação.

País de origem:

Bélgica

Registro ANVISA:

80624960020

Catálogo	Tamanho	Tamanho do Curativo	Conteúdo
M6275033	Pequeno	(10 x 7,5 x 1cm)	1 curativo V.A.C.® WhiteFoam pré-humedecido em água estéril
M6275034	Grande	(10 x 15 x 1cm)	1 curativo V.A.C.® WhiteFoam pré-humedecido em água estéril

Curativos V.A.C.® Whitefoam™



Código do produto	 M6275033	 M6275034
Produto	Curativo V.A.C.® Whitefoam™ Pequeno	Curativo V.A.C.® Whitefoam™ Grande
Tamanho	Pequeno	Grande
Material	Álcool polivinílico (PVA)	Álcool polivinílico (PVA)
Cor da espuma	Branca	Branca
Tamanho do poro	60 a 270 micras	60 a 270 micras
Formato	Retangular	Retangular
Dimensão	10 x 7,5 x 1cm	10 x 15 x 1cm
Conteúdo	1 espuma pré-humedecida em água estéril	1 espuma pré-humedecida em água estéril
Frequência de troca	48-72 horas	48-72 horas
Método de esterilização	ESTÉRIL Radiação gama	ESTÉRIL Radiação gama
Validade	2 anos	2 anos
Fabricante legal	KCI USA, Inc	KCI USA, Inc
País de origem	Bélgica	Bélgica
Informação Adicional	Sem látex	Sem látex
Equipamento compatível	3M V.A.C. ULTA, 3M ACTIVAC	3M V.A.C. ULTA, 3M ACTIVAC
Registro Anvisa	80624960020	80624960020